

VITA SIMULATE Preparation Material

Istruzioni di impiego



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 04.18

VITA – perfect match.

VITA

VITA SIMULATE Preparation Material è un composito fotopolimerizzabile per la realizzazione di monconi artificiali, per simulare il colore del dente preparato. E' un materiale ausiliario che si utilizza soprattutto per la realizzazione di restauri traslucenti in ceramica integrale, nei quali l'effetto cromatico è fortemente condizionato dal colore del moncone.

Con questo prodotto l'odontotecnico è in grado di riprodurre il colore dei denti in modo più semplice e sicuro, in quanto il colore del restauro può essere controllato già in fase preliminare e all'occorrenza corretto.



Lavorazione

Con la VITA SIMULATE Preparation Material Guide l'odontoiatra determina il colore del moncone preparato. La Guide comprende 6 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER. La „S” sta per VITA SIMULATE Preparation Material.

0M1 S,* 1M1 S, 2M3 S, 3M2 S, 4M3 S, 5M3 S

* per monconi sbiancati.

Dopo che l'odontoiatra ha comunicato il colore scelto all'odontotecnico, questo realizza il moncone di controllo con VITA SIMULATE Preparation Material del colore corrispondente, procedendo come segue:



Con il pennello applicare VITA SIMULATE Insulation Liquid (isolante resina/moncone) in strato sottile, uniforme e senza formare pozze sul lato interno della corona ceramica o della faccetta.



Riempire la parte interna del restauro in ceramica con VITA SIMULATE Preparation Material, zeppandolo con uno strumento per modellare per evitare la formazione di cavità.



Premere lo stick di applicazione nel materiale non ancora indurito e prestare attenzione che la punta dello stick si trovi nel centro del restauro e non sia in contatto con le superfici laterali.



Completare la restante cavità e compattare il materiale intorno allo stick. Chiudere la siringa immediatamente dopo l'uso!



Con uno strumento per modellare eliminare le eccedenze di materiale dalle zone marginali.



Con un fotopolimerizzatore o una lampada polimerizzatrice indurire Simulate Preparation Material (v. tabella).

Il fotopolimerizzatore deve essere equipaggiato con una fonte luminosa avente una lunghezza d'onda di 350-500 nm ed un picco di intensità a 470 nm. Questi valori si riferiscono esclusivamente ad apparecchi perfettamente funzionanti. Attenersi alle indicazioni dei produttori degli apparecchi, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione!

Polimerizzazione

Produttore	Apparecchio	Durata
Heraeus Kulzer	Heraflash	90 sec.
Heraeus Kulzer	UniXS	90 sec.
3M ESPE	Visio Alfa	2 intervalli
Hager & Werken	Speed Labolight	3 min.
Shofu	Solidilite V	3 min.



Togliere il moncone VITA SIMULATE completamente polimerizzato e pulire il restauro in bagno ad ultrasuoni. Quindi con l'ausilio del moncone VITA SIMULATE verificare che il colore del restauro in ceramica integrale corrisponda al colore desiderato. All'occorrenza effettuare correzioni cromatiche con i supercolori VITA AKZENT Plus o stratificando VITA VM 9.





VITA SIMULATE Preparation Material KIT

Q.tà	Contenuto	Denominazione	Colore
1	4 g	VITA SIMULATE Preparation Material	0M1 S
1	4 g	VITA SIMULATE Preparation Material	1M1 S
1	4 g	VITA SIMULATE Preparation Material	2M3 S
1	4 g	VITA SIMULATE Preparation Material	3M2 S
1	4 g	VITA SIMULATE Preparation Material	4M3 S
1	4 g	VITA SIMULATE Preparation Material	5M3 S
1	16 ml	VITA SIMULATE Insulation Liquid	
150		VITA SIMULATE stick di applicazione	
1		VITA SIMULATE Preparation Material Guide (Guida colori)	



VITA SIMULATE Preparation Material

Composito fotopolimerizzabile in 6 colori per la realizzazione di monconi artificiali, per simulare il colore del dente preparato.

Siringa da 4 g.



VITA SIMULATE Insulation Liquid

Liquido isolante a base di glicerolo per isolare il materiale per monconi rispetto alla cavità coronale.

Flacone da 16 ml.



VITA SIMULATE stick di applicazione

Stick in plastica trasparente con scanalature di ritenzione per l'applicazione di VITA SIMULATE Preparation Material.

Confezione da 150 pz.



VITA SIMULATE Preparation Material Guide


Guida colori con 6 speciali campioni colore concavi per la determinazione del colore sul moncone preparato.

I seguenti prodotti devono essere contrassegnati:		
<p>VITA SIMULATE Preparation Material</p>	<p>Contiene trietilenglicoldimetacrilato (CAS: 109-16-0), 2-dimetilaminoetilmetacrilato (CAS: 2867-47-2).</p> <p>Provoca grave irritazione della pelle e degli occhi. Può provocare reazioni allergiche della pelle. Indossare guanti, indumenti e occhiali di protezione. Dopo l'uso lavare accuratamente. In caso di contatto con la pelle: lavare con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Se possibile togliere lenti a contatto. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione agli occhi persiste: interpellare o consultare un medico.</p>	
<p>Indumenti di protezione</p>	<p>Durante il lavoro indossare occhiali / mascherina, guanti e indumenti di protezione.</p>	

Le relative schede di sicurezza possono essere scaricate da www.vita-zahnfabrik.com/sds.



Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

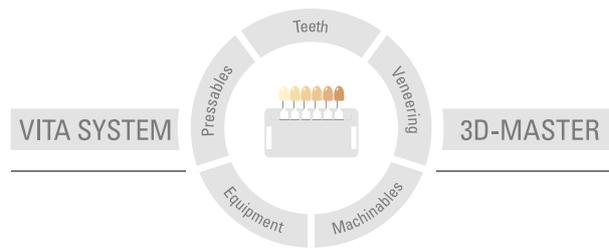

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori. La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell'IVA. In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nei confronti dell'acquirente. Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per comportamento colposo (colpa in "contrahendo", violazione contrattuale positiva, atto illecito) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto.

Data di queste informazioni d'uso: 04.18

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik