


# VITA VIONIC® SOLUTIONS

Per la protesi digitale con sistemi CAD/CAM aperti

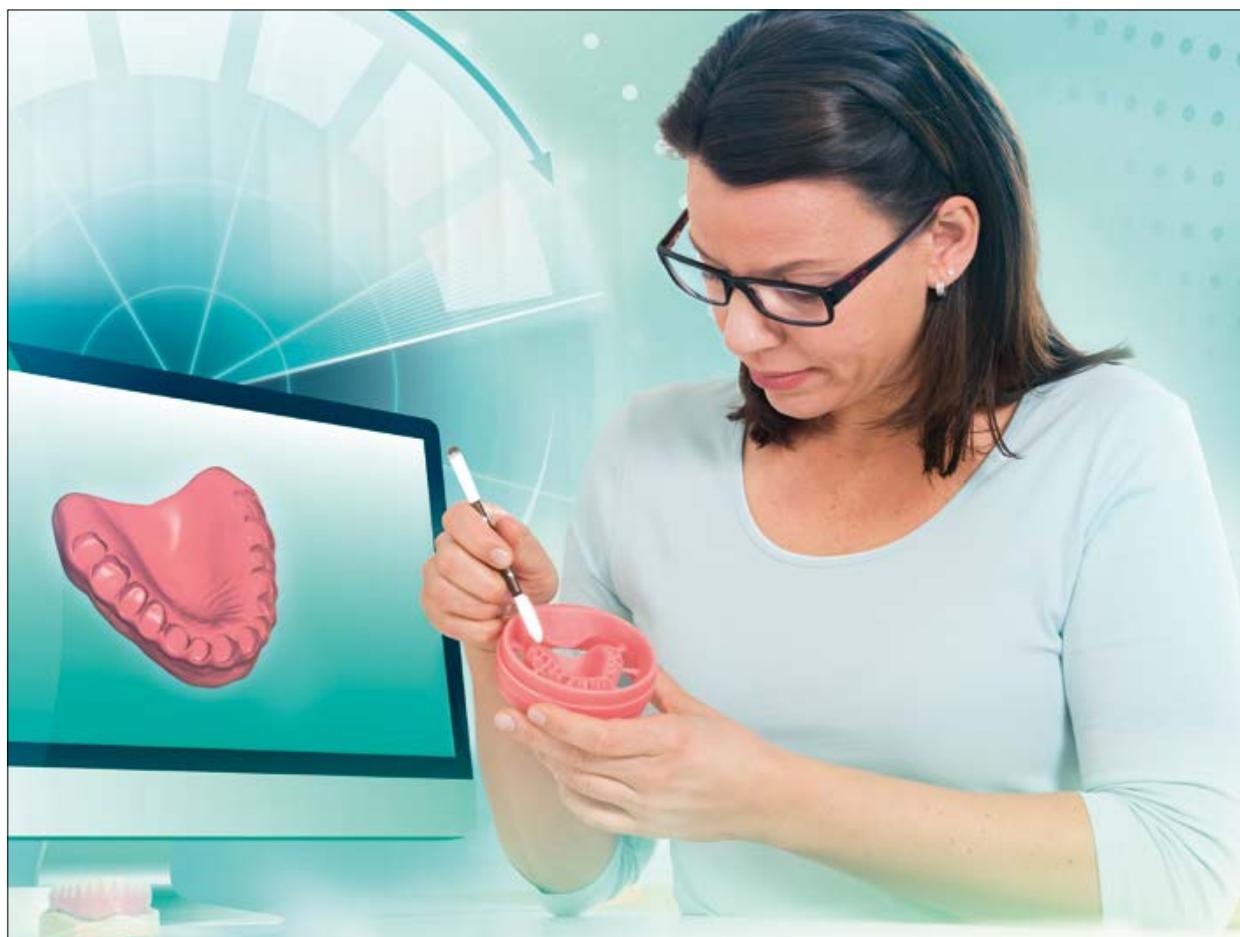

VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 01.18

VITA – perfect match.

**VITA**

## Descrizione del prodotto

VITA VIONIC SOLUTIONS consente l'esecuzione efficiente di montaggi CAD/CAM in cera. Nella prima fase ha luogo il montaggio digitale e rapido della protesi mediante software CAD. Nella seconda fase, analogamente alla progettazione della protesi, con la tecnologia CAM da un disco

VITA VIONIC WAX si realizza una precisa base in cera o un montaggio in cera in formato reale. Dopo aver effettuato con successo la prova, nell'ultima fase si completa la protesi in modo convenzionale. Con VITA VIONIC i laboratori risparmiano tempo e beneficiano di elevata precisione.

## MONTAGGIO IN CERA CAD/CAM




### Cosa?

- Dischi in cera per l'esecuzione di montaggi CAD/CAM in cera

### Con cosa?

- VITA VIONIC WAX Pink (rosa) per una base precisa in cera
- VITA VIONIC WAX White (bianco) per il montaggio in cera a pieno formato

## VANTAGGI

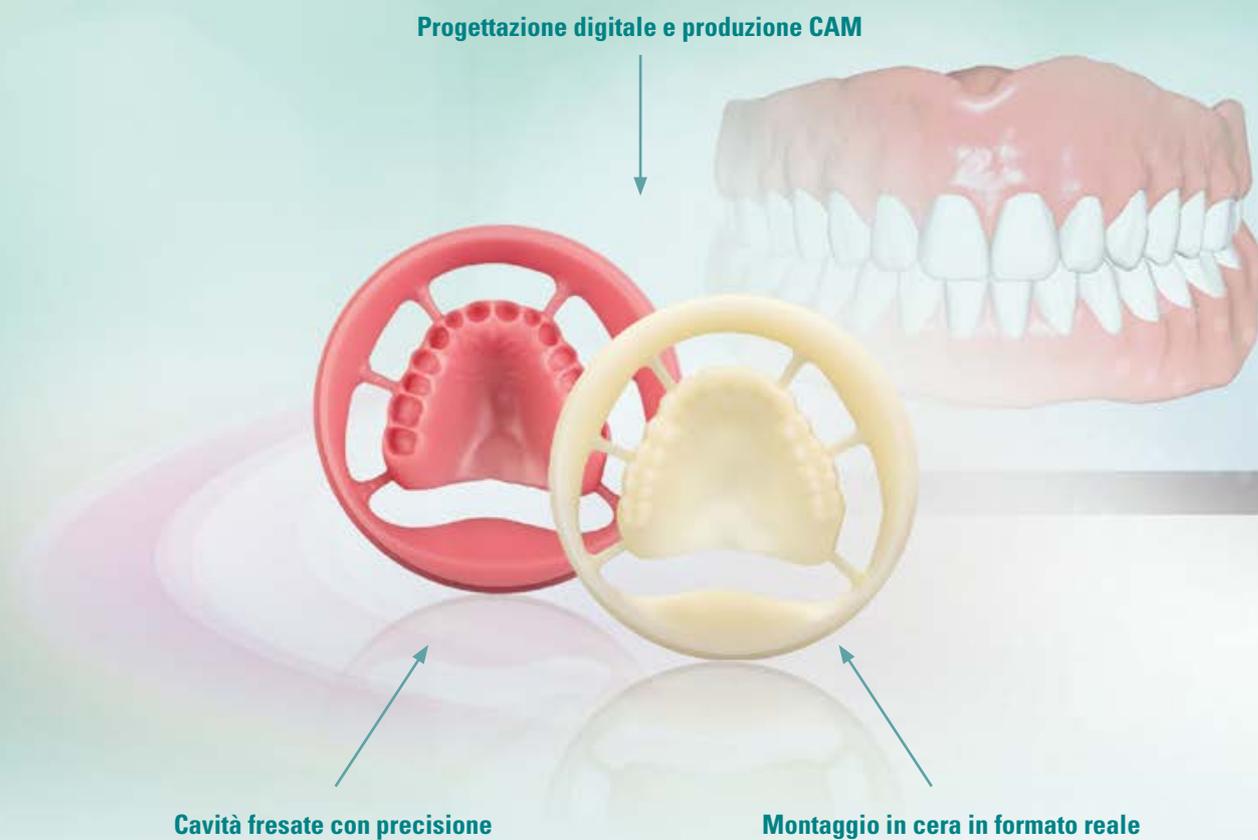

### Montaggio in cera rapido

- grazie alla progettazione digitale e alla produzione CAM


### Montaggio in cera preciso

- grazie a cavità fresate esattamente secondo la progettazione digitale

### Prova in bocca confortevole del montaggio in cera

- grazie alla realizzazione CAD/CAM di protesi in formato reale, in cera bianca

## PROGETTAZIONE CAD

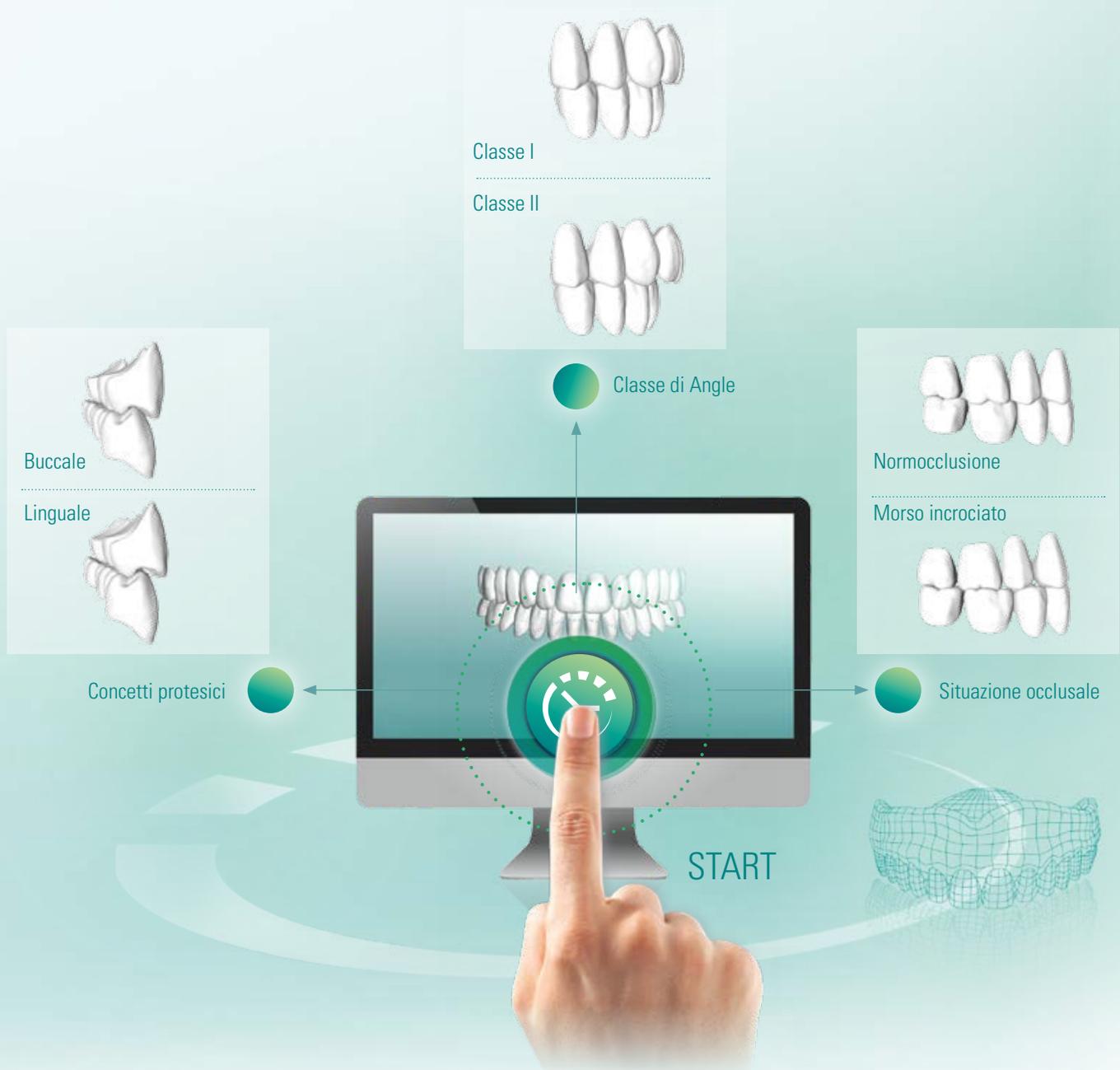

### Cosa?

- Software CAD con opzioni di progettazione specifiche VITA

### Per cosa?


#### Ricostruzione della funzione semplice, personalizzata per il paziente ...

- grazie ai concetti di montaggio buccale e linguale integrati
- grazie alle classi di Angle (I + II) integrate
- grazie alle situazioni occlusali (normocclusione / morso incrociato) integrate

### Per cosa?

- per il montaggio protesico digitale, personalizzato in funzione del paziente, con un semplice clic

## WORKFLOW

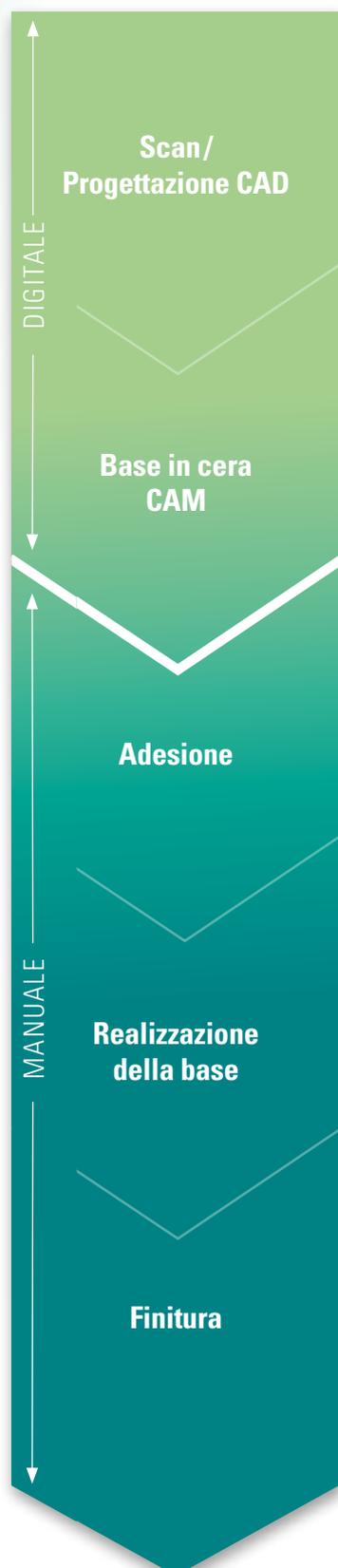

- Per la progettazione CAD della protesi adottate i **concetti protesici** specifici VITA.



- Per la realizzazione del montaggio in cera usate i **dischi in cera sintetica VITA VIONIC WAX**.



- Per un legame sicuro tra denti VITA e materiali per basi usate l'**adesivo VITACOLL**.




- Impiegate i **materiali polimerizzabili a freddo / a caldo** raccomandati da VITA per la realizzazione della base, ad es. con procedimento di iniezione o zeppatura.



- Per la finitura adottate **idonei lucidatori** e per l'individualizzazione il **composito di rivestimento estetico VITA VM LC**.

## INFORMAZIONI DI BASE

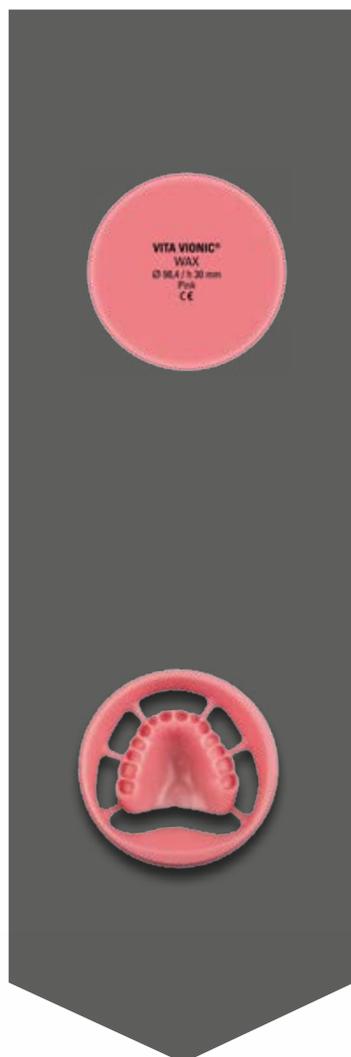

### Caratteristiche

#### VITA VIONIC WAX

- Dischi in cera sintetica di forma stabile, resistenti alla temperatura

### Colori disponibili

- Pink (rosa)
- White (bianco)



### Geometrie disponibili

- Ø 98,4 mm / H 30 mm



## COMPATIBILITA' DI SISTEMA



### Partner di tecnologia CAD per la Protesi Digitale VITA


- 3Shape AS

### VITA VIONIC WAX è disponibile per i sistemi\*:


- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- Serie DG SHAPE DWX (DG SHAPE)

\*) Partner di sistema VITA validati per la lavorazione di componenti VITA VIONIC selezionati

## COMPONENTI DI SISTEMA

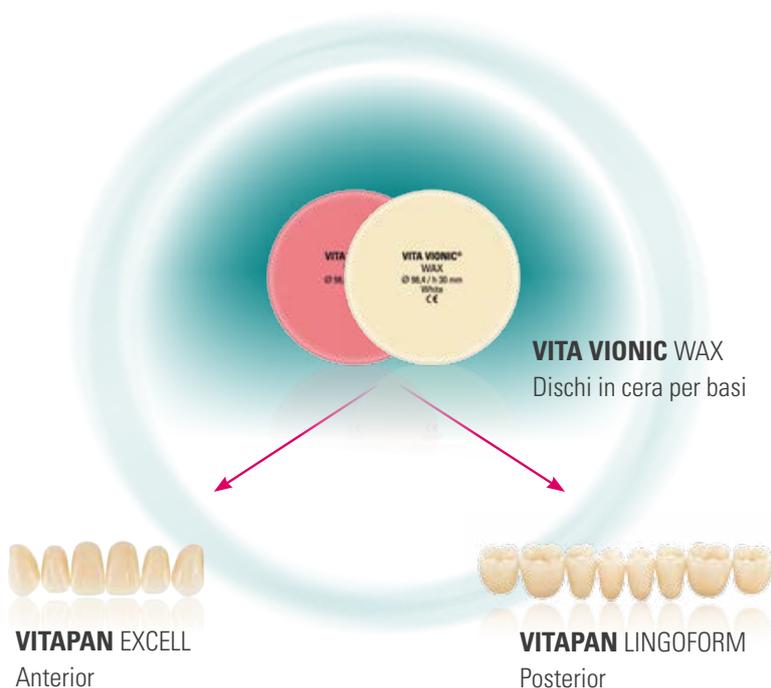

Per ulteriori informazioni su VITA VIONIC SOLUTIONS  
consultare: [www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics](http://www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics)

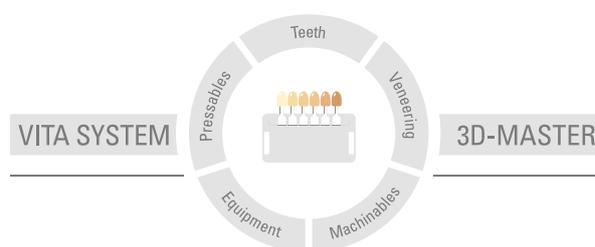

**Avvertenza:** I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori. La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell'IVA. In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nei confronti dell'acquirente. Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per comportamento colposo (colpa in "contrahendo", violazione contrattuale positiva, atto illecito) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto.  
Data di questa informazione per l'uso: 01.18

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA ZAHNFABRIK è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati **CE** 0124 :

**VITA VIONIC®WAX**

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)