

# VITA SMART.FIRE

## Anleitung zur Durchführung eines Software-Updates



Sehr geehrte(r) VITA SMART.FIRE – Anwender(in),

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über das neue Software-Update für Ihren VITA SMART.FIRE informieren und Sie bitten diese Software gemäß der nachstehenden Anleitung auf Ihrem Gerät zu installieren:

Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne unter folgenden Rufnummern zur Verfügung:

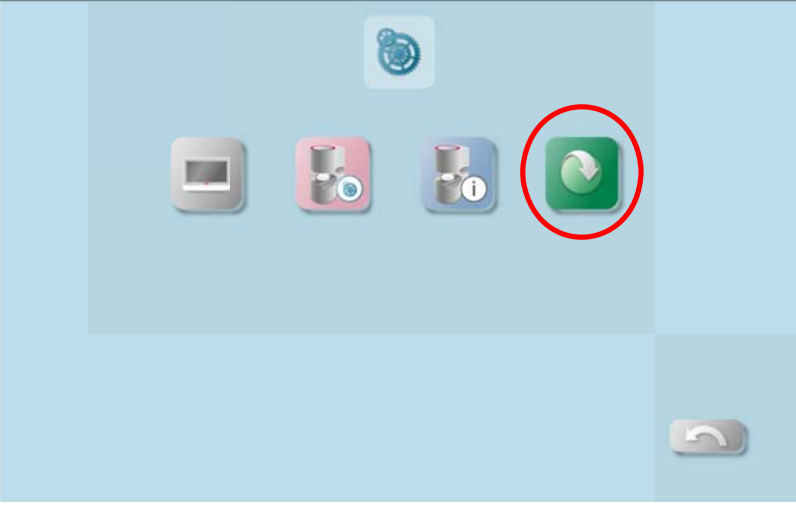


Tel.: 0049 77 61 / 562 – 101, -105 oder -106

Fax: 0049 77 61 / 562 – 102

Email: [instruments-service@vita-zahnfabrik.com](mailto:instruments-service@vita-zahnfabrik.com)

Mit freundlichen Grüßen  
VITA Zahnfabrik  
H. Rauter GmbH & Co. KG  
Abt. Geräteservice

<p>1</p> <p>Exportieren Sie die Update-Datei auf einen leeren USB-Stick</p>	
<p>2</p> <p>Stecken Sie den USB – Stick in einen der USB-Anschlüsse</p>	
<p>3</p> <p>Drücken Sie auf Einstellungen</p>	

<p>4 Drücken Sie auf den Update-Button</p>	
<p>5 Sie erhalten eine Meldung, wenn das Update abgeschlossen ist.</p>	
<p>6 Nun werden Sie gefragt ob sie den aktuellen „STANDARD-Desktop“ durch den aktualisierten „STANDARD-Desktop“ ersetzen möchten</p> <p><i>Hinweis: Wird der aktuelle „STANDARD-Desktop“ ersetzt, gehen alle von Ihnen durchgeführten Änderungen auf diesem Desktop verloren.</i></p>	

Zuletzt werden Sie gefragt ob sie den aktuellen „STANDARD 2-Desktop“ durch den aktualisierten „STANDARD 2-Desktop“ ersetzen möchten

7

*Hinweis: Wird der aktuelle „STANDARD2-Desktop“ ersetzt, gehen alle von Ihnen durchgeführten Änderungen auf diesem Desktop verloren*

