

# VITA SMART.FIRE

## Instructions pour effectuer une mise à jour du logiciel



Chère utilisatrice VITA SMART.FIRE,  
cher utilisateur VITA SMART.FIRE,

Nous vous informons de la nouvelle mise à jour du logiciel de votre VITA SMART.FIRE et vous invitons à mettre à jour le logiciel sur votre appareil en suivant les instructions ci-dessous :

Si vous avez des questions ou des suggestions, nous nous tenons à votre disposition aux coordonnées suivantes :

Tél. : 0049 77 61 / 562 – 101, -105 ou -106

Fax : 0049 77 61 / 562 – 102

Courriel : [instruments-service@vita-zahnfabrik.com](mailto:instruments-service@vita-zahnfabrik.com)

Avec nos sincères salutations.




VITA Zahnfabrik

H. Rauter GmbH & Co. KG

SAV appareils

1	Exportez le fichier de mise à jour sur une clé USB vide	
2	Connectez la clé USB à un port USB	
3	Appuyez sur Paramètres	

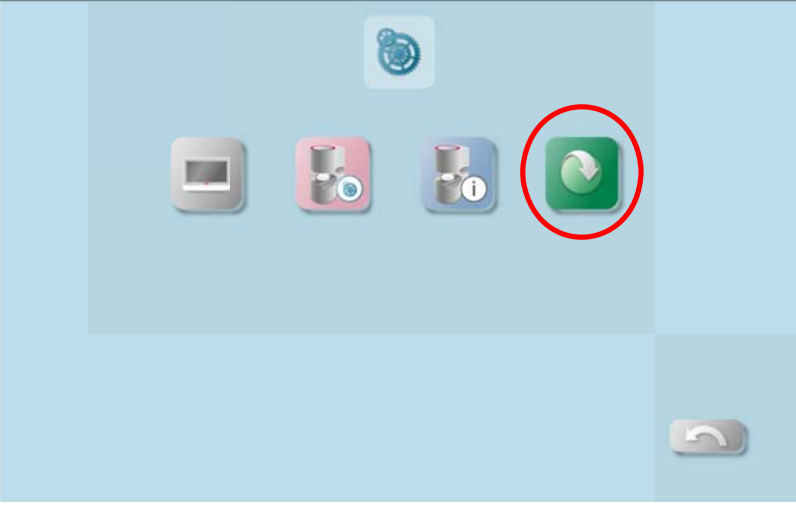

<p>4 Appuyez sur la touche Update (Mise à jour)</p>	 <p>A screenshot of the Vita Smart.Fire interface. At the top center, there is a blue gear icon. Below it, there are four application icons: a grey laptop icon, a pink icon with a blue gear, a blue icon with a white gear, and a green icon with a white circular arrow. The green icon is circled in red. In the bottom right corner, there is a grey button with a white curved arrow pointing left.</p>
<p>5 Un message s'affiche lorsque la mise à jour est terminée.</p>	 <p>A screenshot of the Vita Smart.Fire interface. At the top, the text 'VITA SMART.FIRE' is displayed. Below it, there are several application icons. A grey message box is overlaid in the center with the text 'Update completed' and a white checkmark icon. In the bottom right corner, there is a grey button labeled 'STANDARD'.</p>
<p>6 Vous devez ensuite indiquer si vous souhaitez remplacer le « STANDARD-Desktop » (Bureau standard) actuel par le « STANDARD-Desktop » actualisé</p> <p><i>Remarque : si le « STANDARD-Desktop » actuel est remplacé, toutes les modifications que vous aurez apportées à ce bureau seront perdues.</i></p>	 <p>A screenshot of the Vita Smart.Fire interface. At the top, the text 'VITA SMART.FIRE' is displayed. Below it, there are several application icons. A grey dialog box is overlaid in the center with the text 'Desktop 'STANDARD' replace by the updated Desktop?' and two buttons: a white 'X' icon and a white checkmark icon. In the bottom right corner, there is a grey button labeled 'STANDARD'.</p>

Vous devez ensuite indiquer si vous souhaitez remplacer le « STANDARD 2-Desktop » (Bureau standard) actuel par le « STANDARD 2-Desktop » actualisé

*Remarque : si le « STANDARD 2-Desktop » actuel est remplacé, toutes les modifications que vous aurez apportées à ce bureau seront perdues.*

