

VITA SMART.FIRE®

Startup
Inbetriebnahme

1. Startup
Inbetriebnahme

2. Starting firing process
Brennvorgang starten

1 Device connection
Geräteanschluss



Connect the firing unit and control unit with the connection cable.
Brenneinheit und Bedienelement mit Verbindungskabel verbinden.

2 Mains power connection
Netzanschluss



Connect the firing unit to the mains voltage.
Brenneinheit an Netzspannung anschließen.

3 Switching on firing unit
Brenneinheit einschalten



Press the main switch.
Hauptschalter betätigen.

4 Take out the plastic foam
Schaumstoff entnehmen



Carefully pull the plastic foam upward and remove it.
Schaumstoff vorsichtig nach oben ziehen und entfernen.

5 Open accessory compartment
Zubehörfach öffnen



To open, press the panel inward, and remove the firing tray.
Zum Öffnen Blende nach innen drücken, Brennuträger entnehmen.



For "Starting firing process"/please turn over!
Für „Brennvorgang starten“/bitte wenden!

VITA SMART.FIRE®

Start firing process
Brennvorgang starten

1. Startup
Inbetriebnahme

2. Starting firing process
Brennvorgang starten

1 Prepare firing
Brandvorbereitung



Activate standby temperature.
Bereitschaftstemperatur aktivieren.

2 Available programs
Programmwahl



Select firing program.
Brennprogramm auswählen.

3 Place restoration
Platzierung Restauration



Place the firing tray and restoration
on the firing base.
*Brenntr ger mit Restauration auf
Brennsockel platzieren.*

4 Start firing
Brandstart



Start firing process.
Brennvorgang starten.

5 Completing firing
Brandabschluss



The fire clearance report appears.
Meldung zum Brandabschluss erscheint.

6 Removing restoration
Entnahme Restauration



Remove the firing tray and restoration
and place them on the cooling table.
*Brenntr ger mit Restauration entnehmen
und auf Abk hltisch platzieren.*

