

VITA SMART.FIRE®

Messa in funzione
Mise en route

1. Messa in funzione
Mise en route

2. Avviare il procedimento di cottura
Démarrer le cycle de cuisson

1 Collegamento dell'apparecchio
Raccordement des appareils



Collegare unità di cottura e unità di comando con il relativo cavo.

Connecter le four et l'unité de commande au moyen du câble de liaison.

2 Allacciamento a rete
Branchement au réseau électrique



Collegare l'apparecchio alla rete.
Brancher le four au réseau électrique.

3 Accendere l'unità di cottura
Allumer le four



Azionare l'interruttore principale.
Actionner l'interrupteur principal.

4 Togliere il materiale espanso
Retirer la mousse



Tirare con cautela verso l'alto il materiale espanso e rimuoverlo.

Amener précautionneusement la mousse vers le haut avant de la retirer.

5 Aprire il cassetto porta-accessori
Ouvrir le compartiment à accessoires



Per aprire spingere verso l'interno il pannello frontale, prelevare il supporto di cottura.

Pour ouvrir, pousser le panneau vers l'intérieur et retirer le support de cuisson.



Per „Avviare il procedimento di cottura“/girare la pagina!
Pour « Démarrer le cycle de cuisson » /voir au dos !

VITA SMART.FIRE®

Avviare il procedimento di cottura
Démarrer le cycle de cuisson

1. Messa in funzione
Mise en route

2. Avviare il procedimento di cottura
Démarrer le cycle de cuisson

1 Preparazione della cottura
Préparation de la cuisson



Attivare la temperatura di stand-by.
Activer la température de veille.

2 Selezione del programma
Choix du programme



Selezionare il programma di cottura.
Sélectionner le programme de cuisson.

3 Posizionamento del restauro
Positionnement de la restauration



Posizionare il supporto di cottura con il restauro sullo zoccolo di cottura.
Placer le support de cuisson avec la restauration sur le socle de cuisson.

4 Avvio della cottura
Début de la cuisson



Avviare il procedimento di cottura.
Démarrer le cycle de cuisson.

5 Fine della cottura
Fin de la cuisson



Appare la segnalazione di fine cottura.
Un message indiquant la fin de la cuisson s'affiche.

6 Prelevare il restauro
Retrait de la restauration



Prelevare il supporto di cottura col restauro e posizionarlo sul piano di raffreddamento.
Retirer le support de cuisson avec la restauration et les placer sur la tablette de refroidissement.



Domande sulle soluzioni di prodotto VITA?/Questions au sujet des produits VITA ?
Hotline tecnica/Assistance téléphonique technique +49(0)7761/562 56 22 22 · info@vita-zahnfabrik.com

VITA