

VITA SMART.FIRE®

Puesta en servicio
Iniciar funcionamiento

1. Puesta en servicio
Iniciar funcionamiento

2. Iniciar el proceso de cocción
Iniciar o procedimiento de queima

1 Conexión de los aparatos
Ligação do aparelho



Conectar el aparato de cocción a la unidad de mando mediante el cable de conexión.
Conectar a unidade de queima e o painel de controle com o cabo de conexão.

2 Conexión a la red eléctrica
Ligação de rede



Conectar el aparato de cocción a la red eléctrica.
Ligar a unidade de queima na tensão de rede.

3 Encender el aparato de cocción
Ligar a unidade de queima



Pulsar el interruptor principal.
Ligar o interruptor principal.

4 Retirar goma espuma
Remova a espuma



Levantar la goma espuma con cuidado hacia arriba y retirarla.
Puxe com cuidado a espuma para cima e remova.

5 Abrir el cajón de accesorios
Abrir o compartimento de acessórios



Presionar la moldura hacia dentro para abrir el cajón y extraer el soporte de cocción.
Para abrir, empurrar o painel para dentro, retirar a bandeja de queima.



Para "Iniciar el proceso de cocción"/véase al dorso!
Para "Iniciar o procedimento de queima"/gire!

VITA SMART.FIRE®

Iniciar el proceso de cocción
Iniciar o procedimento de queima

1. Puesta en servicio
Iniciar funcionamiento

2. Iniciar el proceso de cocción
Iniciar o procedimento de queima

1 Preparación de la cocción
Preparação da queima



Activar la temperatura de espera.
Ativar temperatura de espera.

2 Selección del programa
Seleção do programa



Seleccionar el programa de cocción.
Selecionar o programa de queima.

3 Colocación de la restauración
Colocação da restauração



Colocar el soporte de cocción con la restauración en el zócalo de cocción.
Colocar a bandeja de queima e restauração sobre a base de queima.

4 Inicio de la cocción
Início da queima



Iniciar el proceso de cocción.
Iniciar o procedimento de queima.

5 Fin de la cocción
Conexão de queima



Se muestra un mensaje indicando el fin de la cocción.
A mensagem do fim da queima é exibida.

6 Extracción de la restauración
Retirar a restauração



Extraer el soporte de cocción con la restauración y depositarlos sobre la mesa de enfriamiento.
Retirar a bandeja de queima com a restauração e posicionar sobre a mesa de arrefecimento.



¿Tiene alguna pregunta sobre las soluciones de producto VITA?/Dúvidas relacionadas às soluções de produto VITA?
Línea directa de asistencia técnica/Tel. do hotline técnico +49(0) 7761/562 56 22 22 · info@vita-zahnfabrik.com

VITA