

VITA ENAMIC® Corone su impianti

Istruzioni di impiego



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore


VITA Controllo del colore

Data 07.18

VITA – perfect match.

VITA

Una nuova classe merceologica	4
Indicazioni e controindicazioni	5
Fasi procedurali	6
Requisiti geometrici	7
Fissaggio adesivo su abutment	8
– Condizionamento della corona VITA ENAMIC	8
– Condizionamento di abutment in biossido di zirconio	10
– Condizionamento di abutment in titanio	12
Materiali consigliati	14
Avvertenze di sicurezza	14

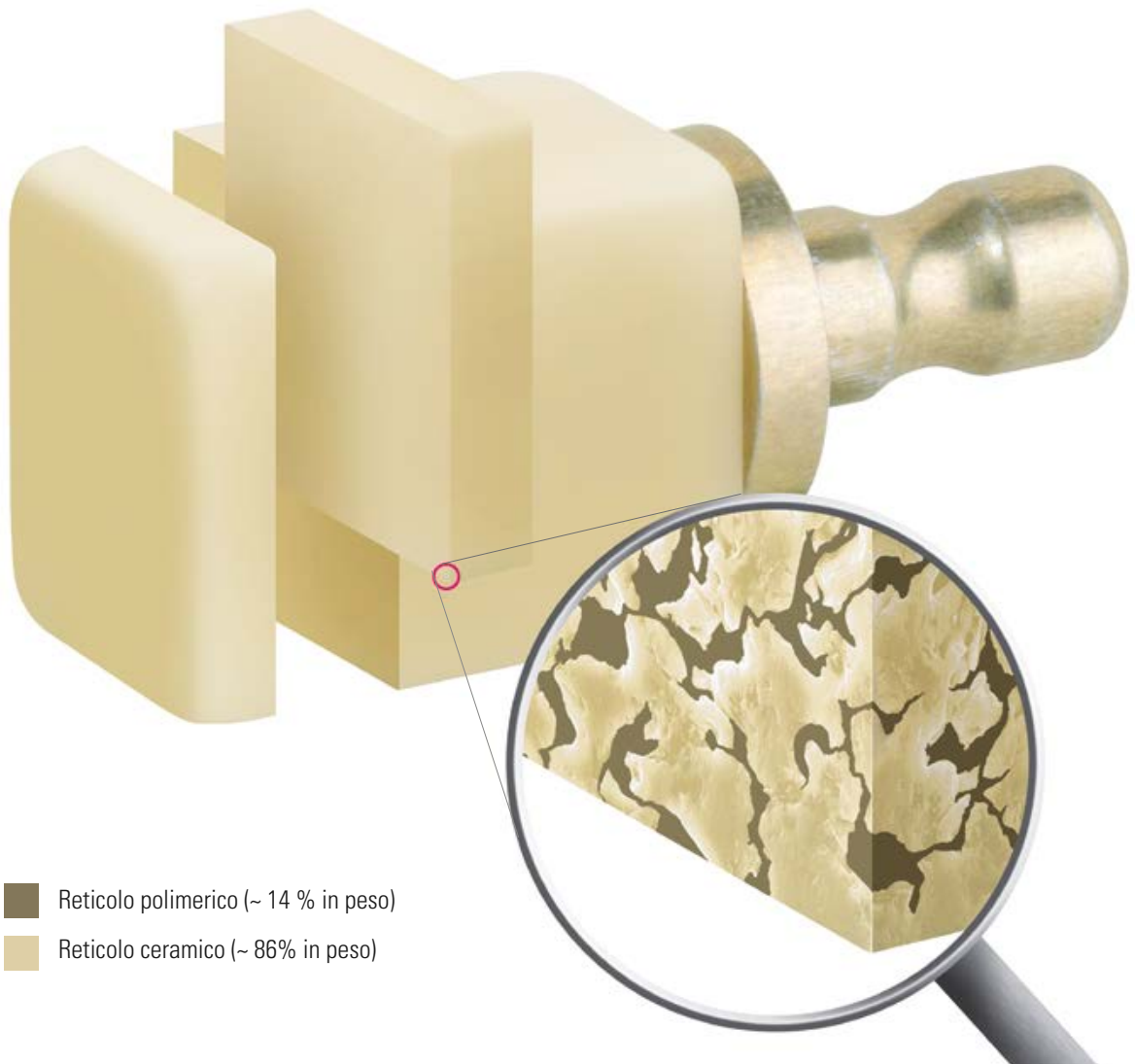

- Reticolo polimerico (~ 14 % in peso)
- Reticolo ceramico (~ 86% in peso)



Descrizione del prodotto






VITA ENAMIC è la prima ceramica ibrida con struttura reticolare duale a livello mondiale. In questo materiale il reticolo dominante di ceramica a struttura microfine è rafforzato da un reticolo polimerico ed i due reticoli si compenetrano integralmente. VITA ENAMIC è pertanto un materiale dentale a doppia struttura, che riunisce i pregi della ceramica e del composito.

VITA ENAMIC è indicato per corone singole su abutment implantari

Presupposti necessari:

- Unione adesiva sicura tra corona VITA ENAMIC e abutment:
 - Geometria sufficiente (diametro, altezza, profilo di emergenza) dell'abutment [1]*.
- Osservanza generale delle regole per restauri in ceramica integrale [2]*
 - Evitare bordi e spigoli vivi sull'abutment.
- Supporto cervicale della corona tramite la spalla dell'abutment come con un moncone dentario naturale
 - Becco di flauto o gradino a 90 gradi con angolo interno arrotondato ed una larghezza di min. 0,8. mm

⚠ Avvertenza: le avvertenze di lavorazione per gli abutment sono raccomandazioni generali puramente indicative. Per richieste riguardanti l'abutment da usare per la singola indicazione, contattare il produttore degli impianti [3]*.

Indicazioni	
Corone frontali e posteriori su impianti*	
Corone frontali e posteriori	
Inlays / onlays / corone parziali	
Tavolati occlusali	
Faccette	


* La configurazione dell'abutment deve soddisfare i requisiti di una preparazione funzionale alla ceramica e consentire l'osservanza degli spessori minimi per corone in VITA ENAMIC. Attenersi alle istruzioni di impiego del produttore degli impianti e del materiale di fissaggio adesivo. Per ulteriori informazioni: Istruzioni di impiego VITA ENAMIC Corone su impianti, Nr. 10077, nonché le istruzioni di impiego VITA IMPLANT SOLUTIONS, Nr. 10150.

Controindicazioni

- Riabilitazioni a ponte
- Riabilitazioni a cantilever
- Parafunzioni (ad es. bruxismo)


* Indicazioni v. pag. 15

Fasi procedurali per corone VITA ENAMIC su abutment - fissaggio adesivo

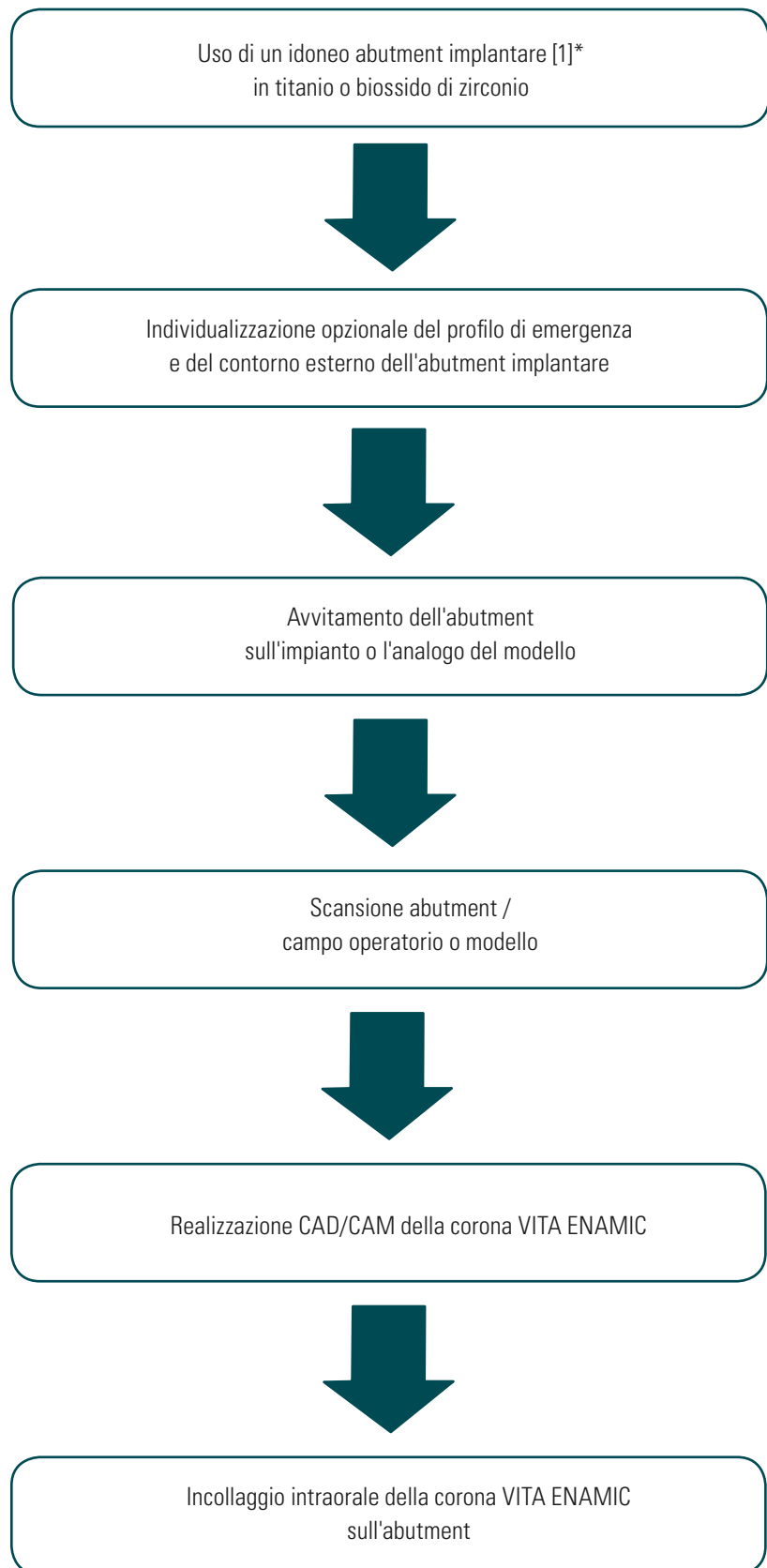

*Indicazioni v. pag. 15

Requisiti geometrici dell'abutment

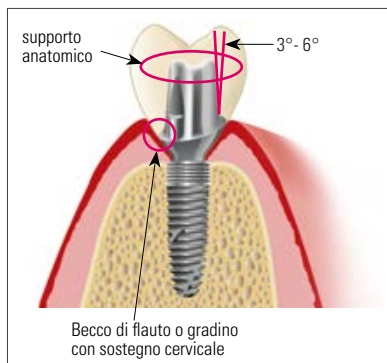


⚠ **Avvertenze:** per la preparazione dell'abutment seguire le direttive generali per la preparazione di monconi da riabilitare con corone in ceramica integrale, nonché le indicazioni dei singoli produttori relative all'impiego dell'abutment.

Generalità da osservare:

- Il diametro e le dimensioni devono essere adattati alla situazione clinica e al sistema di impianti scelto.
- Interventi sull'abutment possono essere eseguiti solo a condizione di attenersi alle indicazioni del rispettivo produttore.
- Devono essere rispettati i requisiti geometrici per una statica sicura della riabilitazione coronale:
- Evitare bordi e spigoli vivi.
- Angolo di convergenza verticale dell'abutment 3-6°.


Requisiti geometrici della corona VITA ENAMIC

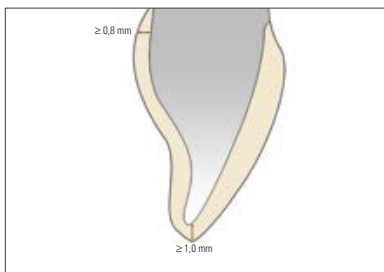

Per assicurare il successo clinico di restauri in VITA ENAMIC, vanno osservati i seguenti spessori minimi:

Corone frontali

Spessore incisale: **min. 1,0 mm**
Spessore circolare: **min. 0,8 mm**

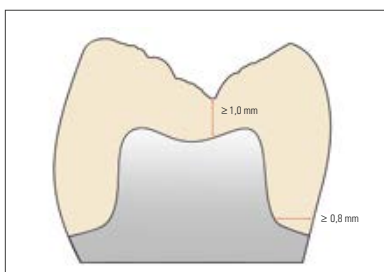

Corone posteriori

Zona delle fessure: **min. 1,0 mm**
Spessore circolare: **min. 0,8 mm**

⚠ Avvertenze:

- Per un'unione adesiva ottimale di corone in VITA ENAMIC su abutment implantari, si raccomanda esclusivamente il fissaggio adesivo. L'uso di idonei agenti adesivi su abutment in titanio o biossido di zirconio è imprescindibile per un legame ottimale tra i materiali. Sono indicati speciali compositi di fissaggio o agenti adesivi contenenti monomeri fosfatici e silani adesivi, che instaurano una reazione chimica senza idrolisi con le superfici in titanio e biossido di zirconio.
- Un fissaggio autoadesivo con compositi o una cementazione convenzionale con cementi a base di fosfato di zinco, carbossilato o vetroionomero non sono consigliati.
- Una preparazione precisa e accurata delle superfici di legame è il presupposto per un incollaggio adesivo sicuro e duraturo tra corona VITA ENAMIC e abutment.

Attenersi alle istruzioni d'uso dei produttori dei rispettivi prodotti!




Condizionamento delle superfici

1. Condizionamento della corona VITA ENAMIC

Prima del fissaggio adesivo sgrassare la corona con alcool.

Eventualmente ricoprire superfici esterne già lucidate, per non mordenzarle inavvertitamente.

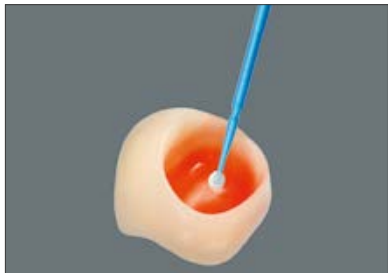

Applicare VITA ADIVA CERA-ETCH (acido fluoridrico in gel al 5%) sulle superfici da incollare.

Tempo di mordenzatura: 60 sec.



Eliminare accuratamente qualsiasi residuo di acido sciacquando con lo spray d'acqua oppure mediante immersione in bagno ad ultrasuoni.

Quindi asciugare per 20 sec. Non spazzolare, pericolo di contaminazione!
Una volta asciutte le superfici mordenzate risultano bianche opache.



Sulle superfici mordenzate applicare un adesivo al silano (ad es. VITA ADIVA C-PRIME).

Con un getto d'aria distribuire delicatamente l'adesivo al silano.

2. Condizionamento di abutment in biossido di zirconio



Profilo di emergenza e canale di avvitamento dell'abutment in biossido di zirconio vanno protetti o chiusi con della cera o del silicone. Proteggere la geometria di connessione con l'analogo del modello o una cappetta per lucidatura [3]*.



Sabbigare con cautela esclusivamente le superfici da incollare dell'abutment in biossido di zirconio con corindone (Al_2O_3),

- granulometria 50 μm ,
- pressione 2 bar.



Detergere quindi in bagno ad ultrasuoni, con alcool o una vaporiera ed asciugare con un getto d'aria.

Dopo la detersione le superfici da incollare non vanno più toccate. L'eventuale contaminazione potrebbe influire negativamente sul successivo legame di adesione.



Con un pennellino monouso o un microbrush applicare un agente adesivo per biossido di zirconio, contenente monomeri fosfatici, come ad es. VITA ADIVA ZR-PRIME.









Lasciar agire VITA ADIVA ZR-PRIME per 10 sec. e quindi distribuire delicatamente con un getto d'aria priva d'olio.

⚠ Avvertenza: attenersi alle istruzioni d'uso dei produttori dei singoli prodotti!!

*Indicazioni v. pag. 15

Riepilogo delle fasi procedurali per l'incollaggio di corone VITA ENAMIC su abutment in biossido di zirconio

Fasi procedurali		Abutment in biossido di zirconio	Corona VITA ENAMIC
 1.	Sabbiatura con corindone (Al ₂ O ₃)	50 µm, max. 2,0 bar	–
 2.	Detersione della superficie	Bagno ad ultrasuoni, etanolo	Etanolo
 3.	Mordenzatura (extraorale)	–	VITA ADIVA CERA-ETCH, 5% HF, 60 sec
 4.	Detersione della superficie	–	con spray d'acqua o in bagno ad ultrasuoni.
 5.	Adesivo / Silanizzazione	Applicare VITA ADIVA ZR-PRIME e lasciar agire per 10 sec. quindi distribuire delicatamente con un getto d'aria	Applicare VITA ADIVA C-PRIME e distribuire delicatamente con un getto d'aria
 6.	Fissaggio adesivo/autoadesivo	ad es. VITA ADIVA F-CEM o VITA ADIVA S-CEM	

3. Condizionamento di abutment in titanio



Profilo di emergenza e canale di avvitamento dell'abutment in titanio vanno protetti o chiusi con della cera o del silicone. Proteggere la geometria di connessione con l'analogo del modello o una cappetta per lucidatura [3]*.



Sabbiare con cautela esclusivamente le superfici da incollare della base in titanio con Al_2O_3 ,

- granulometria 50 μm ,
- pressione 2 bar,



finché la superficie diventa opaca.



Eliminare quindi la cera o il silicone.



Detergere la base in titanio in bagno ad ultrasuoni, con alcool o vaporiera ed asciugarla con un getto d'aria priva d'olio.

*Indicazioni v. pag. 15



Dopo la detersione le superfici da incollare non vanno più toccate. L'eventuale contaminazione potrebbe influire negativamente sul successivo legame di adesione.

Con un pennellino monouso o un microbrush applicare un idoneo adesivo per metallo come ad es. VITA ADIVA M-PRIME.






Lasciare agire VITA ADIVA M-PRIME per 10 sec. e distribuirlo delicatamente con un getto d'aria priva d'olio.


Asciugare quindi con un getto d'aria priva d'olio.








⚠ **Avvertenza:** attenersi alle istruzioni d'uso dei produttori dei singoli prodotti!

Riepilogo delle fasi procedurali per l'incollaggio di corone VITA ENAMIC su abutment in titanio

Fasi procedurali		Abutment in titanio	Corona VITA ENAMIC
1.	Sabbiatura con corindone (Al ₂ O ₃)	50 µm, 2,0 bar	–
2.	Detersione della superficie	Bagno ad ultrasuoni, etanolo	Etanolo
3.	Mordenzatura (extraorale)	–	VITA ADIVA CERA-ETCH, 5% HF, 60 sec.
4.	Detersione della superficie	–	con spray d'acqua o in bagno ad ultrasuoni.
5.	Condizionamento / silanizzazione	Applicare VITA ADIVA M-PRIME, lasciar agire 10 sec. e distribuire delicatamente con un getto d'aria.	Applicare VITA ADIVA C-PRIME e distribuire delicatamente con un getto d'aria
6.	Fissaggio adesivo/autoadesivo	ad es. VITA ADIVA F-CEM o VITA ADIVA S-CEM	

Prodotti consigliati	
<ul style="list-style-type: none"> • Gel mordenzante per ceramica per VITA ENAMIC <ul style="list-style-type: none"> – VITA ADIVA CERA-ETCH, acido fluoridrico in gel al 5% (VITA) – Siringa da 3 ml – Flacone contagocce da 6 ml 	
<ul style="list-style-type: none"> • Adesivo a base di silano per VITA ENAMIC <ul style="list-style-type: none"> – VITA ADIVA C-PRIME 	
<ul style="list-style-type: none"> • Adesivo per biossido di zirconio <ul style="list-style-type: none"> – VITA ADIVA ZR-PRIME 	
<ul style="list-style-type: none"> • Adesivo per titanio <ul style="list-style-type: none"> – VITA ADIVA M-PRIME 	
<ul style="list-style-type: none"> • Compositi di fissaggio a indurimento duale per VITA ENAMIC su abutment in titanio / biossido di zirconio <ul style="list-style-type: none"> – VITA ADIVA F-CEM – VITA ADIVA S-CEM 	

I seguenti prodotti devono essere contrassegnati:		
<p>VITA ADIVA® CERA-ETCH (Acido fluoridrico in gel per ceramica)</p>	<p>Corrosivo/Tossico</p> <p>Solo per uso extraorale! Contiene acido fluoridrico. Tossico per ingestione. Letale per contatto con la pelle. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per inalazione. Indossare occhiali / guanti / indumenti di protezione. Conservare sotto chiave. In caso di ingestione interpellare immediatamente un centro antiveleni e presentare la scheda di sicurezza. In caso di contatto con la pelle/gli indumenti togliere immediatamente gli indumenti contaminati e sciacquare con acqua abbondante. Per misure specifiche si veda la scheda di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua per alcuni minuti e interpellare un medico/centro antiveleni. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.</p>	

I seguenti prodotti devono essere contrassegnati:		
VITA ADIVA® C-PRIME (Adesivo a base di silano)	Pericolo Liquido e vapori facilmente infiammabili. Conservare lontano da fonti di calore / scintille / fiamme / superfici calde. Non fumare.	
VITA ADIVA® ZR-PRIME (Adesivo per biossido di zirconio)	Pericolo Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione degli occhi. Può provocare sonnolenza e vertigini. Conservare lontano da fonti di calore / scintille / fiamme / superfici calde. Non fumare.	 
VITA ADIVA® M-PRIME (Adesivo per metalli)	Pericolo Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione degli occhi. Può provocare sonnolenza e vertigini. Conservare lontano da fonti di calore / scintille / fiamme / superfici calde. Non fumare.	 
VITA ADIVA® S-CEM (Composito di fissaggio autoadesivo)	Attenzione Provoca irritazioni della pelle. Provoca grave irritazione degli occhi. Può provocare reazioni allergiche della pelle. Irritazione delle vie respiratorie - Può irritare le vie respiratorie.	
Indumenti di protezione	Durante in lavoro indossare occhiali / mascherina, guanti e indumenti di protezione. In caso di formazione di polvere lavorare con aspirazione o mascherine di protezione.	


Le relative schede di sicurezza possono essere scaricate da www.vita-zahnfabrik.com/sds.



Note:

- [1] Abutment confezionati o individuali per restauri cementati o fissati con metodo adesivo.
Contattare il produttore degli impianti per indicazioni riferite al sistema.
- [2] „Aspetti clinici in ceramica integrale“, VITA Zahnfabrik, Nr. 1696.
- [3] Contattare il produttore degli impianti per indicazioni riferite al sistema.

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

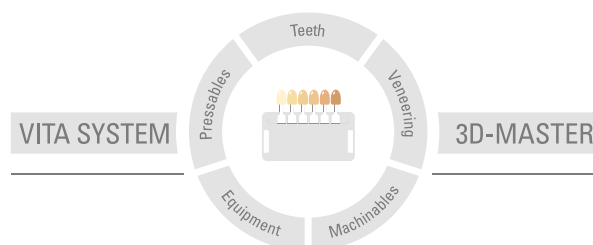

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori. La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell'IVA. In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nei confronti dell'acquirente. Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per comportamento colposo (colpa in "contrahendo", violazione contrattuale positiva, atto illecito) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto.
Data di queste istruzioni di impiego: 06.18

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA ZAHNFABRIK è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed il seguente prodotto è marcato  0124 :

VITA ENAMIC®

VITA ENAMIC® e VITA ADIVA® sono marchi registrati della VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.

Ringraziamo la BEGO Implant Systems, D-Bremen per la grafica del titolo e la grafica a pagina 7 in alto, e per la visualizzazione dei componenti implantari utilizzati

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik