

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Quick-Start Verarbeitungsanleitung



WAK-unabhängiges, hoch fluoreszierendes Glasur-Spray

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – FACTS & FEATURES

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY ist:

- ein WAK-unabhängiges, hoch fluoreszierendes Glasur-Spray für alle gängigen Verblendkeramiken, monolithische Zirkon-, Silikat-, Feldspat- oder Glaskeramiken
- geeignet zur Erreichung einer natürlichen Fluoreszenz speziell bei monolithischen vollkeramischen Restaurationen ohne Eigen-Fluoreszenz
- zum Versiegeln der Keramikoberfläche geeignet

Mit VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY profitieren Sie von:

- einfacher Fluoreszenzsteigerung
- schnellem und sicherem Glasieren
- höchästhetischen Ergebnissen durch natürliche Fluoreszenz

SYSTEMKOMPONENTEN



VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Einsatz von VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY-Auftrag:

- Restauration reinigen
- Spraydose unmittelbar vor der Anwendung kräftig schütteln
- Sprühkopf ca. 10 cm vor der zur besprühenden Oberfläche halten
- von allen Seiten eine gleichmäßige Schicht aufsprühen
- Restauration zum (Malfarben- und) Glanzbrand auf Brennträger platzieren und gemäß Brennparametern brennen



> Optimale Schichtstärke



> Zu dünn aufgetragen



> Zu dick aufgetragen



Bitte beachten:

- Sollte der Glanz nicht ausreichen, kann der Prozess wiederholt werden

1 Erzielen einer natürlichen Fluoreszenz

2 Am Beispiel einer natürlichen Krone und monolithischen Zirkondioxid-Frontzahnkronen

natürliche Krone

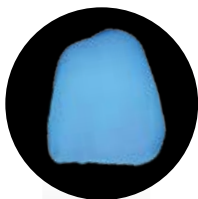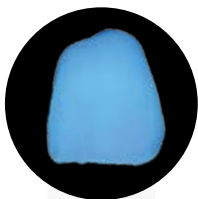


monolithische
Zirkondioxid Krone




> keine Eigen-
fluoreszenz


mit Wettbewerbs-Fluoreszenz

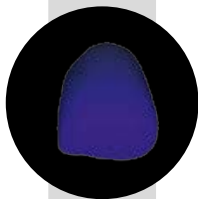

> zu schwache
Fluoreszenz

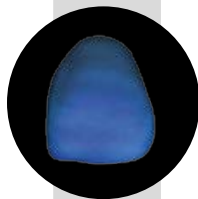

> streifig durch
Einsatz von Paste

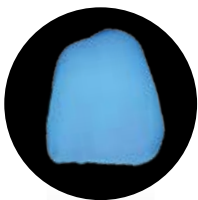

mittel



> zu hohe Fluoreszenz



mit VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**



Perfekt abgestimmt und homogen aufgetragenes Fluoreszenz- und Glasurmittel

> VITA AKZENT **Plus FLUOGLAZE LT**

VITA AKZENT® Plus – Produktportfolio

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- besonders chromatische und deckende Farben
- zur Reproduktion individueller Farbtöne und farblichen Angleichungen jeder natürlichen Farbcharakteristik
- dick aufgetragen decken sie die darunterliegende Basisfarbe vollständig ab

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- lasierende, durchscheinende Massen, die wie ein dünner Farbfilter auf dem Basismaterial wirken
- für Farbveränderungen und Farbverschiebungen in Richtung rötlich, gelblich, orange, bräunlich oder grau-grünlich

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- lasierende Farben zur Veränderung der Chromazität des Basismaterials innerhalb einer Farbgruppe

VITA AKZENT Plus GLAZE

- Glasurmasse für eine glänzende, glasartige, homogene und geschlossene Oberfläche nach dem Brand

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: niederschmelzende Glasurmasse für Keramiken mit Brenntemperaturen unter 800 °C

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- WAK-unabhängiges, hoch fluoreszierendes Glasur-Spray zur Erreichung natürlicher Fluoreszenz

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- für eine natürliche Oberflächentextur mit einem matten Glanz






VITA AKZENT® Plus – Verfügbare Farben

VITA AKZENT Plus

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

ES01		weiß
ES02		creme
ES03		zitronengelb
ES04		sonnengelb
ES05		orange
ES06		roströt
ES07		khaki
ES08		rosa
ES09		dunkelrot
ES10		lila
ES11		blau
ES12		grau-blau
ES13		grau
ES14		schwarz






VITA AKZENT Plus BODY STAINS

BS01		gelb
BS02		gelb-braun
BS03		orange
BS04		olive-grau
BS05		grau-braun

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA classical A1–D4

CSA		rötlich-bräunlich
CSB		rötlich-gelblich
CSC		gräulich
CSD		gräulich-rötlich

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA SYSTEM 3D-MASTER

CSL		gelblich
CSM2		gelblich-rötlich
CSM3		gelb-rot
CSR		rötlich
CSIO		orange

VITA AKZENT Plus GLAZE

GLAZE		
GLAZE LT		
FLUOGLAZE LT		
FINISHING AGENT		



TECHNISCHE HOTLINE

Fragen rund um VITA Produktlösungen? Die **erfahrenen Zahntechniker und Technikberater ZT Ralf Mehlin und ZT Daniel Schneider** beantworten sie unter:

- ▶ **Phone +49(0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **Mail info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8.00 bis 17.00 Uhr CET**

Weitere internationale Kontaktdaten zur Erreichbarkeit

- ▶ finden Sie unter **www.vita-zahnfabrik.com/contacts**



ONLINE-SUPPORT

Fragen rund um die Verarbeitung und zu Produktlösungen? Kompetente Antworten finden Sie online in Form von **FAQs, Videos und elektronischen Lerneinheiten.**

Weitere, detaillierte Informationen finden Sie u. a. in der komplett umfassenden VITA AKZENT Plus Verarbeitungsanleitung.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com