

VITA Linearguide 3D-MASTER®

Determinación sistemática y precisa del color dental correcto



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 06.18

VITA – perfect match.

VITA

Descripción del producto

La guía VITA Linearguide 3D-MASTER permite determinar el color dental correcto de forma rápida y precisa. Gracias al diseño ergonómico y a la estructura sistemática de la guía VITA Linearguide 3D-MASTER, se localiza con agilidad el color adecuado del sistema 3D-MASTER.

La VITA Linearguide 3D-MASTER simplifica el cambio de los sistemas de determinación del color convencionales a la determinación y la comunicación del color precisas con el VITA SYSTEM 3D-MASTER. Para más información, consulte nuestra web: www.vita-zahnfabrik.com

VITA Linearguide 3D-MASTER® Simplemente eficaz



Una vez abierta la Linearguide 3D-MASTER, extraiga la guía de claridad Valueguide 3D-MASTER.



Realice una preselección con la VITA Valueguide 3D-MASTER comparando las varillas de colores con el diente natural. Decida qué nivel de claridad (de 0 a 5) se corresponde mejor con el color dental.



A continuación, en función de su preselección, tome de la caja de plástico la VITA Chroma/Hueguide 3D-MASTER correspondiente (0/1, 2, 3, 4 o 5) y lleve a cabo el ajuste final de la intensidad y la tonalidad cromáticas.



En solo dos pasos habrá determinado con rapidez y seguridad el color dental adecuado.

Ventajas

- Determinación rápida y precisa del color dental adecuado en solo dos pasos
- Estructura sistemática y diseño moderno que permiten una utilización sencilla e intuitiva
- Muestras de colores claramente estructuradas en función de la claridad, la intensidad y la tonalidad cromáticas
- 26 colores dentales naturales ordenados sistemáticamente; tres colores de blanqueamiento dental adicionales (VITA Bleached Shades)
- Posibilidad de obtener colores intermedios mediante mezcla

Aproveche las ventajas del VITA SYSTEM 3D-MASTER y la posibilidad de determinar de forma sistemática y segura todos los colores dentales.

Denominación	Ref.
VITA Linearguide 3D-MASTER	B363

VITA