

# VITA Linearguide 3D-MASTER®

Une manière systématique et précise d'identifier la bonne couleur



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 2023-03

VITA – perfect match.

**VITA**

## Descriptif du produit

Avec le VITA Linearguide 3D-MASTER vous déterminez vite et bien la couleur de dent correcte. Le design ergonomique et la structure systématique du VITA Linearguide 3D-MASTER permettent de trouver rapidement la couleur 3D-MASTER qui convient.

Le VITA Linearguide 3D-MASTER facilite le passage des systèmes de détermination des couleurs traditionnels à un système et une communication des couleurs précis au sein de VITA SYSTEM 3D-MASTER. Pour de plus amples informations consultez le site [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

## VITA Linearguide 3D-MASTER® Simplement efficace



Prenez le VITA Valueguide 3D-MASTER dans le VITA Linearguide 3D-MASTER ouvert.



Faites un premier choix avec le VITA Valueguide 3D-MASTER en comparant les barrettes de couleur avec la dent naturelle. Décidez quel est le degré de luminosité entre 0 et 5 qui correspond le mieux à la couleur de la dent.



À présent en fonction de votre premier choix prenez dans la boîte en plastique le VITA Chroma / Hueguide 3D-MASTER (0/1, 2, 3, 4 ou 5) correspondant pour affiner votre choix et déterminer la saturation et la teinte.



En seulement deux étapes vous avez identifié la bonne couleur de dent rapidement, d'une manière fiable.

### Avantages

- En seulement deux étapes vite et bien la bonne couleur de dent
- Structure systématique et design moderne pour une utilisation rapide et intuitive
- Agencement clair des échantillons de couleur en luminosité, saturation et teinte
- 26 couleurs de dent naturelles, classées systématiquement avec en plus trois couleurs blanchies (VITA Bleached Shades)
- Possibilité d'obtenir des couleurs intermédiaires par mélange

Profitez des avantages du VITA SYSTEM 3D-MASTER et de la possibilité de déterminer toutes les couleurs de dent d'une manière sûre et systématique.

Désignation	N° art.
VITA Linearguide 3D-MASTER	B363

**VITA**