

# Indicaciones de seguridad de VITA

## Instrucciones para la puesta en servicio

- Solo se permite utilizar los aparatos después de leer y entender íntegramente los correspondientes manuales de instrucciones e indicaciones de seguridad y conforme a los procedimientos que en estos se describen. Cualquier uso distinto o que vaya más allá, como p. ej. el procesamiento de productos distintos a los previstos, así como la manipulación de sustancias peligrosas o nocivas para la salud, se considera no conforme a lo prescrito.
- Evitar la conexión eléctrica a tomas de enchufe de distribución con cable alargador, ya que existe peligro de incendio en caso de sobrecarga.
- Bajo ningún concepto se debe poner el aparato de cocción en funcionamiento sin el zócalo de cocción montado.
- No introducir la mano en la cámara de cocción abierta mientras el aparato esté conectado, ya que existe peligro de sufrir una descarga eléctrica o quemaduras por el contacto con piezas bajo tensión o muy calientes.
- No manejar la unidad de mando/pantalla táctil con objetos que tengan bordes afilados o estén muy calientes, ya que provocarían daños.
- No está permitida la utilización de los aparatos con fuentes de alimentación, productos, etc. sujetos a una normativa sobre sustancias peligrosas o que pudieran afectar de cualquier manera a la salud de los usuarios, ni con dispositivos alterados por el usuario.

## Instrucciones para la puesta fuera de servicio

Mientras no se utilice el aparato de cocción, el elevador debe estar dentro de la cámara de cocción y el aparato debe estar apagado con el interruptor principal. Cerrar la cámara de cocción para proteger el aislamiento e impedir la absorción de humedad.

## Instrucciones para la limpieza

- Desenchufe el aparato siempre antes de limpiarlo.
- No deben utilizarse detergentes ni líquidos inflamables para ninguno de los trabajos de limpieza.
- No manejar la unidad de mando con objetos que tengan bordes afilados o estén muy calientes, ya que dañarían la pantalla táctil.

## Instrucciones para reparaciones

Los trabajos de reparación de cualquier tipo deberán ser realizados exclusivamente por personal técnico especialmente cualificado.

Pictograma		
<b>Tensión peligrosa</b>	Este pictograma advierte de la existencia de tensiones peligrosas. Antes de abrir el aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica	
<b>Superficie caliente</b>	Este pictograma informa sobre la existencia de superficies calientes. Existe la posibilidad de sufrir quemaduras.	
<b>Eliminación separada</b>	Proceder conforme a las normas de eliminación de dispositivos eléctricos y electrónicos; no eliminar junto con la basura doméstica. La barra negra bajo el símbolo "cubo de basura" significa que el aparato fue comercializado después del 13/08/2005. Debe recordarse que el aparato está sujeto a la directiva 2002/96/CE (RAEE) y a las leyes nacionales vigentes en el país correspondiente, y que debe ser entregado a un centro de eliminación adecuado. Dirigirse a un distribuidor en caso de que sea preciso eliminar el aparato.	
<b>Nota</b>	Este pictograma advierte sobre situaciones peligrosas con posibles daños personales o del aparato.	

El manual de instrucciones está disponible en el sitio web de VITA: [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

# VITA

# Avisos de segurança VITA

## Avisos para colocação em funcionamento

- A operação dos aparelhos somente é permitida se as instruções contidas no(s) respectivo(s) manual(is) de operação/avisos de segurança tiverem sido completamente lidas e compreendidas, bem como observados os procedimentos aqui descritos. É considerado impróprio qualquer outro uso além do indicado, como o processamento de outros produtos diferentes daqueles previstos para esta finalidade, bem como a manipulação de materiais ou substâncias perigosas!
- Evitar ligação elétrica em tomadas de extensão, pois a sobrecarga pode resultar em um risco de incêndio!
- Sob nenhuma circunstância deve-se colocar o aparelho de queima em funcionamento sem a base de queima!
- Não toque na câmara de queima aberta enquanto o aparelho estiver ligado: risco de queimaduras ou de choque elétrico devido ao contato com peças quentes ou sob tensão.
- Não operar o painel de controle/tela sensível ao toque com objetos pontiagudos ou quentes, pois podem causar danos ao display.
- A operação dos aparelhos não é permitida com fontes de energia, produtos, etc. que sejam classificadas como substâncias perigosas ou que possam ter quaisquer impactos sobre a saúde do pessoal de operação ou com o equipamento tendo sido feitas alterações pelo usuário.

## Avisos para colocação fora de funcionamento

No caso da não utilização do aparelho de queima, trazer a bandeja de queima na câmara de queima para a posição inicial e desligar o aparelho com interruptor principal. O fechamento da câmara de queima protege o isolamento e evita a absorção de umidade.

## Avisos para a limpeza

- Retirar o plugue da tomada antes de qualquer limpeza!
- Nunca utilize produtos de limpeza ou fluidos inflamáveis durante trabalhos de limpeza.
- Não utilizar o painel de controle com objetos pontiagudos ou quentes, estes podem causar danos à tela.

## Avisos para reparos

Todos os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados somente por técnicos especialmente treinados.

Pictograma		
<b>Voltagem perigosa</b>	Este pictograma adverte sobre voltagem perigosa. Antes de ser aberto, o aparelho deve ser desligado, retirando o plugue da tomada elétrica.	
<b>Superfície quente</b>	Este pictograma chama a atenção para superfícies quentes. Possibilidade de ocorrer queimaduras.	
<b>Descarte seletivo</b>	Observar as regras de eliminação de aparelhos elétricos/eletrônicos; eliminação não deve ocorrer através do lixo residencial. A barra preta sob o símbolo „lata de lixo” significa que o aparelho foi colocado no mercado depois de 13.08.2005. Observe que este aparelho está sujeito à Diretiva 2002/96/CE (REEE) e às leis nacionais aplicáveis em seu país e que deverá ser descartado de acordo com os procedimentos adequados. Entre em contato com seu revendedor caso o aparelho deva ser descartado.	
<b>Aviso</b>	Este pictograma chama a atenção para situações perigosas com possíveis danos a pessoais ou materiais.	

O manual de operação encontra-se disponível no site da VITA: [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

# VITA