

VITA Indicazioni di sicurezza

Avvertenze per la messa in funzione

- La messa in esercizio degli apparecchi è consentita soltanto se sono state lette e comprese interamente le relative istruzioni di impiego / avvertenze di sicurezza e se vengono osservate le procedure in esse descritte. Un uso diverso, come ad es. la lavorazione di prodotti differenti da quelli previsti nonché l'uso di sostanze pericolose o sostanze dannose alla salute, è da considerarsi come non conforme alla destinazione.
- Non usare prolunghe per l'allacciamento elettrico. In caso di sovraccarico sussiste il pericolo di incendio.
- Mai mettere in funzione il forno senza aver posizionato lo zoccolo di cottura!
- Quando il forno è collegato a rete, non mettere le mani all'interno della camera di cottura aperta; sussiste il pericolo di scosse o ustioni toccando parti sotto tensione o calde.
- Per l'esercizio dell'unità di comando / touch-screen non utilizzare oggetti appuntiti o caldi, che possono creare danni.
- L'esercizio degli apparecchi non è consentito con fonti di energia, prodotti ecc. che sono soggetti alle normative sulle sostanze pericolose o che provocano in qualsiasi modo un effetto sulla salute degli utilizzatori con modifiche apportate dall'utilizzatore.

Avvertenze per lo spegnimento

Quando il forno non è in uso far salire il lift nella camera di cottura e spegnere l'apparecchio con l'interruttore principale. La chiusura della camera di cottura protegge l'isolamento ed evita l'assorbimento di umidità.

Avvertenze per la pulizia

- Prima di pulire il forno staccare la spina!
- Per tutti i lavori di pulizia non utilizzare detergenti né liquidi combustibili.
- Per l'esercizio dell'unità di comando non utilizzare oggetti appuntiti o caldi, che possono danneggiare il touchscreen.

Avvertenze per le riparazioni

Riparazioni e interventi di qualsiasi tipo devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato appositamente addestrato.

Pittogrammi		
Tensioni pericolose	Questo pittogramma segnala la possibilità di tensioni pericolose. Prima di aprire l'apparecchio staccare la spina dalla presa di rete.	
Superfici calde	Questo pittogramma segnala superfici calde. Sono possibili ustioni.	
Smaltimento separato	Attenersi alle disposizioni per lo smaltimento separato di rifiuti elettrici/elettronici. Non smaltire con i rifiuti domestici. La barra nera sotto il simbolo „contenitore della spazzatura mobile” significa che l'apparecchio è stato messo in commercio dopo il 13.08.2005. Attenzione: l'apparecchio è soggetto alla Direttiva europea 2002/96/CE (RAEE) e alle leggi nazionali vigenti nel Vostro paese, e quindi va smaltito ad un apposito centro di raccolta. Rivolgersi al proprio rivenditore, quando l'apparecchio deve essere smaltito.	
Avvertenza	Questo pittogramma segnala situazioni pericolose con possibilità di danni a persone o all'apparecchio.	

Le istruzioni di impiego sono reperibili nel sito VITA: www.vita-zahnfabrik.com

VITA

Consignes de sécurité VITA

Consignes pour la mise en route

- Les appareils s'utilisent uniquement après avoir intégralement lu et compris le(s) mode(s) d'emploi et les consignes de sécurité et dans le respect des modes opératoires décrits. Toute autre utilisation que celle indiquée, à savoir par ex. la transformation d'autres produits que ceux prévus ou la manipulation de substances dangereuses ou nocives pour la santé, est considérée comme non conforme !
- Éviter le branchement électrique sur des multiprises à rallonge ; risque d'incendie en cas de surcharge !
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil de cuisson sans avoir mis en place un socle de cuisson !
- Ne pas mettre la main dans l'enceinte de cuisson ouverte lorsque l'appareil est branché, risque de décharge électrique ou de brûlures en cas de contact avec des pièces sous tension ou chaudes.
- Ne pas utiliser l'unité de commande/l'écran tactile avec des objets pointus ou chauds qui risquent de les endommager.
- Les appareils ne doivent pas être utilisés avec des sources d'énergie, des produits, etc. soumis à un décret sur les substances dangereuses ou pouvant affecter pour une quelconque raison la santé des utilisateurs, ou avec des équipements modifiés par l'utilisateur.

Consignes pour la mise hors service

En cas d'inutilisation de l'appareil de cuisson, monter le lift dans l'enceinte de cuisson et couper l'appareil avec l'interrupteur. La fermeture de l'enceinte de cuisson protège l'isolation et évite l'absorption d'humidité.

Consignes pour le nettoyage

- Avant tout nettoyage, débrancher la prise de courant !
- Ne jamais utiliser de produits de nettoyage et de liquides inflammables pour les travaux de nettoyage.
- Ne pas utiliser l'unité de commande avec des objets pointus ou chauds qui risquent d'endommager l'écran tactile.

Consigne pour les réparations

Les réparations et les tâches de maintenance quel qu'en soit le type ne doivent être effectuées que par un personnel spécialisé formé à cet effet.

Pictogramme		
Tensions dangereuses	Ce pictogramme est un avertissement contre les tensions dangereuses. Avant d'ouvrir l'appareil, il faut le débrancher pour le couper de la tension du secteur.	
Surface chaude	Ce pictogramme attire l'attention sur les surfaces chaudes. Risque de brûlures.	
Élimination séparée	Éliminer à part les appareils électriques/électroniques, ne pas jeter dans les ordures ménagères. La colonne noire sous le symbole „Poubelle“ signifie que le four a été mis en circulation après le 13/08/2005. Veuillez noter que l'appareil est soumis à la directive 2002/96/EG (DEEE) et aux lois nationales en vigueur dans le pays et doit être éliminé dans un centre prévu à cet effet. Veuillez contacter votre revendeur lorsque l'appareil doit être éliminé.	
Observation	Ce pictogramme attire l'attention sur des situations dangereuses avec des risques possibles pour les personnes et les équipements.	

Le mode d'emploi se trouve sur le site internet de VITA : www.vita-zahnfabrik.com

VITA