

# > VITA Easyshade® V

## Quick Start Guide



1.



**CZ** – Před použitím nechte přístroj 12 hodin nabíjet.

**PL** – Przed użyciem naładuj baterię urządzenia przez min. 12 godzin.

**HU** – Használat előtt töltsse a készüléket 12 órán át.

**BG** – Преди употреба зареждайте уреда в продължение на 12 часа.

**RO** – Încărcăți aparatul timp de 12 ore înainte de utilizare.

**SA** – اشحن الوحدة لمدة 12 ساعة قبل الاستخدام

**RS/HR** – Pre upotrebe uređaj punite 12 sati.

2.



**CZ** – Měřicí hrot vsuňte do ochranného krytu.

**PL** – Końcówkę pomiarową wsuń w osłonkę ochronną.

**HU** – Csúsztassa a mérőfejet a védőkupakba.

**BG** – Сложете измервателния връх в предпазното фолио.

**RO** – Acoperiți vârful de măsurare cu o folie de protecție.

**SA** – أدخل غطاء الحماية من التلوث على حساس القياس

**RS/HR** – Umetnite mjernu sondu u kontrolni štit.



3.



**CZ** – Zapněte tlačítkem měření.

**PL** – Naciśnij przycisk pomiaru.

**HU** – Bekapcsolás Mérés gombbal.

**BG** – Включете с бутона за измерване.

**RO** – Porniți aparatul acționând butonul de măsurare.

**SA** – شغل الوحدة بالضغط على زر القياس

**RS/HR** – Uključite putem tastera za merenje.

4.



- CZ** – VITA Easyshade® V položte na základní jednotku a stiskněte tlačítko pro kalibraci.
- PL** – Końcówkę urządzenia VITA Easyshade® V włóż do portu kalibracyjnego i naciśnij przycisk kalibracji.
- HU** – Helyezze VITA Easyshade® V-t a bázisegységre, és kalibrálásához nyomja meg a Mérés gombot.
- BG** – Сложете VITA Easyshade® V на базовата станция и активирайте измервателния бутон за калибриране.
- RO** – Așezați VITA Easyshade® V pe unitatea de bază. Acționând butonul de măsurare începeți calibrarea.
- SA** – اضعط زر القياس لتفعيل المعايرة على VITA Easyshade® V بوضع وحدة
- RS/HR** – VITA Easyshade® V postavite na baznu stanicu i pritisnite taster za merenje radi kalibracije.

5.



- CZ** – Dotykem vyberte určení základní barvy.
- PL** – Wybierz opcję doboru koloru podstawowego na ekranie dotykowym.
- HU** – Megérintve jelölje ki az Alapszín meghatározása opciót.
- BG** – С докосване изберете Определяне на основен цвят.
- RO** – Selectați și confirmați prin atingere modul „alegerea culorii de bază”.
- SA** – نختار و نؤكد قياس اللون الأساسي باللمس
- RS/HR** – Određivanje osnovne boje obavite dodirrom.

6.



- CZ** – Pro změření středu dentinu stiskněte tlačítko měření.
- PL** – Ustaw końcówkę sondy w centralnej części zęba i naciśnij przycisk pomiaru.
- HU** – Mérés a dentin centrumában a Mérés gomb megnyomásával.
- BG** – Измерете в центъра на дентина, като натиснете бутона за измерване.
- RO** – Pentru măsurarea centrului dentinei apăsați butonul de măsurare.
- SA** – اضعط زر قياس اللون لتحديد لون العاج
- RS/HR** – Merite u centru dentina pritiskom na taster za merenje.

7.



- CZ** – Zobrazí se barva zuba.
- PL** – Odczytaj kolor zęba.
- HU** – Fogszín leolvasása.
- BG** – Отчетете цвета на зъба.
- RO** – Citiți culoarea dintelui.
- SA** – اقرأ درجة لون السن
- RS/HR** – Očitajte boju zuba.



**VITA**