

VITA VMK Master®

Mode d'emploi rapide



Pour le cosmétique des infrastructures métalliques dans une plage de CDT classique (13,8 – 15,2).

VITA – perfect match.

VITA

>Faits & caractéristiques

VITA VMK Master® est :

- une céramique cosmétique feldspathique naturelle pour le revêtement cosmétique des infrastructures métalliques dans une plage de CDT classique (13,8 – 15,2).

Avec VITA VMK Master® vous bénéficiez :

- d'une mise en œuvre précise et sûre,
- de remarquables propriétés de mise en œuvre, comme par ex. une très bonne aptitude à la sculpture,
- d'une simplicité de manipulation et d'un retrait minime,
- de restaurations très esthétiques grâce à de brillantes couleurs.

COMPOSANTS DU SYSTÈME



>1. Mesures préparatoires

➤ Cuisson OPAQUE



1



2

💡 Conseil de mise en œuvre

APPLICATION OPAQUE

- Mélanger l'opaque en poudre avec OPAQUE FLUID jusqu'à une consistance crémeuse
- Appliquer avec un pinceau ou un instrument en verre en couche couvrante sur la surface à incruster
- Si nécessaire, répéter l'opération avec une deuxième cuisson pour un bon recouvrement de l'infrastructure

! N. B.

- Spécialement dans le cas d'alliages non précieux, d'alliages à fraiser et à fritter, effectuer une cuisson WASH OPAQUE ou VITA NP BOND pour une meilleure cohésion
- Pour de plus amples informations, consultez le site www.vita-zahnfabrik.com

📅 Programme de cuisson conseillé pour OPAQUE

	Prés. °C	→ min	↗ min	↗ °C/min	Temp env. °C	→ min	Vide min
Pâte	500	6.00	5.38	80	950	1.00	5.38
Poudre	500	2.00	5.38	80	950	1.00	5.38

>2. Stratification DENTINE

▶ Stratification de DENTINE



1



2



3

💡 Conseil de mise en œuvre

Stratification de DENTINE

- En cas d'espace restreint, appliquer OPAQUE DENTINE au niveau de la base et en présence d'un élément intermédiaire dans la zone cervicale du pontique
- En commençant par les crêtes mésiales et distales, monter la DENTINE sur toute la dent
- Afin d'aménager suffisamment de place pour l'émail, réduire la DENTINE dans le tiers supérieur

! N. B.

- Il arrive fréquemment qu'au niveau de la canine, l'espace manque pour appliquer les masses dentine et émail
- On appliquera donc ici une mince couche de OPAQUE DENTINE. De ce fait, la couleur correcte est conservée, spécialement en cas d'épaisseurs de couche inférieures à 0,8 mm

> 3. Stratification d'ENAMEL

▶ Stratification d'ENAMEL



1



2



3

💡 Conseil de mise en œuvre

Stratification d'ENAMEL

- Appliquer ENAMEL pour compléter la forme de la couronne
- Surdimensionner légèrement la forme pour compenser le retrait à la cuisson
- Avant la première cuisson de dentine pour les bridges, séparer les éléments unitaires au niveau des espaces interdentaires jusqu'à l'opaque avec un couteau à séparer légèrement humide

! N. B.

- Après avoir retiré le bridge du modèle, il faut compléter les zones de contact avec DENTINE et ENAMEL
- Déposer ensuite le bridge à cuire sur un support de cuisson

🏠 Programme conseillé pour la 1re cuisson de dentine

Prés. °C	→ min	↗ min	↗ °C/min	Temp env. °C	→ min	Vide min
500	6.00	7.49	55	930	1.00	7.49

> 4. Finition

➤ Cuisson de glaçage avec VITA AKZENT Plus



1



2



3

💡 Conseil de mise en œuvre

Finition

- Le travail complet peut être recouvert si nécessaire de VITA AKZENT Plus GLAZE
- Les colorants VITA AKZENT Plus sont à votre disposition afin d'accentuer la couleur dans certaines zones et de personnaliser le travail

⚠ N. B.

- Avant de poursuivre le travail, il faut dépoussiérer soigneusement la restauration avec une brosse sous l'eau courante ou dans un appareil à vapeur !

📄 Programme conseillé pour la cuisson de glaçage avec VITA AKZENT Plus

Prés. °C	→ min	↗ min	↗ °C/min	Temp env. °C	→ min	Vide min
500	4.00	5.15	80	920	1.00	—

> Schéma de stratification

Exemple de stratification standard

Cuisson OPAQUE



1

Stratification de DENTINE



2

Stratification d'ENAMEL



3

Résultat après
1^{re} cuisson
de dentine



3a

Corrections anatomiques facultatives
après la première cuisson de dentine



3b

Résultat après 2^e cuisson de dentine



Finition



4

Résultat final



> Assistance téléphonique et support

 **Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire**

▶ Assistance technique en ligne

Pour toute question technique au sujet des produits VITA, vous pouvez contacter nos conseillers techniques, messieurs Ralf Mehlin ou Daniel Schneider.

Tél. +49 (0) 7761 / 56 22 22

Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46

de 8h à 17h HEC

Courriel info@vita-zahnfabrik.com

Vous trouverez les coordonnées d'autres contacts internationaux sur www.vita-zahnfabrik.com/contacts

▶ Assistance en ligne

Des questions sur la mise en œuvre et les produits ? Vous trouverez des réponses en ligne sous la forme de FAQ, de vidéos et de modules de formation en ligne.

Vous trouverez de plus amples informations entre autres, dans le mode d'emploi complet VITA VMK Master.

www.vita-zahnfabrik.com

www.facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com