

Équipements VITA

Information technique



VITA vPad excellence 10,1" VITA vPad comfort 10,1"

Les unités de commande vPad pour les fours VITA de nouvelle génération ont été récemment remplacées par les modèles remaniés et plus performants **VITA vPad comfort** (à partir de l'année de construction 08/2018 ; n° d'art. DVPADCV1) et **VITA vPad excellence** (à partir de l'année de construction 05/2017 ; n° d'art. DVPADEXV1).

Les nouveaux modèles de vPad disposent notamment d'écrans plus grands (10,1"), d'une meilleure résolution, avec fonction tactile optimisée, et sont extrêmement résistants aux sollicitations mécaniques. En particulier, les bris de verre sont évités.

Les nouvelles unités de commande vPad peuvent être utilisées avec les fours VITA à partir de l'année de construction 05/2017 sans matériel supplémentaire.

L'utilisation des nouvelles unités de commande vPad est aussi possible avec des fours plus anciens (jusqu'à l'année de construction 04/2017), mais une alimentation supplémentaire est nécessaire pour le vPad. Cette alimentation est fournie par le câble injecteur VITA Power (n° d'art. D63100). Le câble injecteur VITA Power n'est nécessaire que lorsqu'un four datant d'avant 05/2017 doit être utilisé avec un nouveau modèle de vPad (écran 10,1").

Vous trouverez aux pages suivantes des informations plus détaillées au sujet de la nécessité d'utiliser un câble injecteur VITA Power et de la mise en service du four avec l'unité de commande vPad et le câble injecteur Power.

VITA vPad avec écran 10,1" + appareil de cuisson

(jusqu'à l'année de construction 04/2017)

Pour l'utilisation du

VITA vPad excellence



DVPADEXV1

à partir du numéro de série 2820170051
(à partir de l'année de construction 05/2017)

VITA vPad confort



DVPADCV1

à partir du numéro de série 3020180051
(à partir de l'année de construction 08/2018)

avec un



VITA VACUMAT® 6000 M

jusqu'au numéro de série 1320178853
(jusqu'à 04/2017)



VITA VACUMAT® 6000 MP

jusqu'au numéro de série 1820172400
(jusqu'à 04/2017)



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

jusqu'au numéro de série 2120170987
(jusqu'à 04/2017)

Utilisation individuelle

En cas d'utilisation individuelle (= **SANS boîtier de commutation**), un câble injecteur Power est impératif.

La mise en service s'effectue comme suit.



1. Injecteur
2. Câble de connexion (vPad excellence - injecteur)
3. Câble de connexion (injecteur - four)
4. Adaptateur secteur



Injecteur/câble de
raccordement
(point jaune + anneau)



Nouveau vPad/câble de raccordement
(point bleu + anneau)



1/5 = Interrupteur marche/arrêt
uniquement pour le vPad, le
four est allumé/éteint via
l'interrupteur principal




Utiliser le raccord du haut
(appareil de cuisson jusqu'à 04/2017)

VITA vPad excellence avec écran 10,1" + boîtier de commutation + appareils de cuisson

(toutes les années de construction)

Pour l'utilisation du

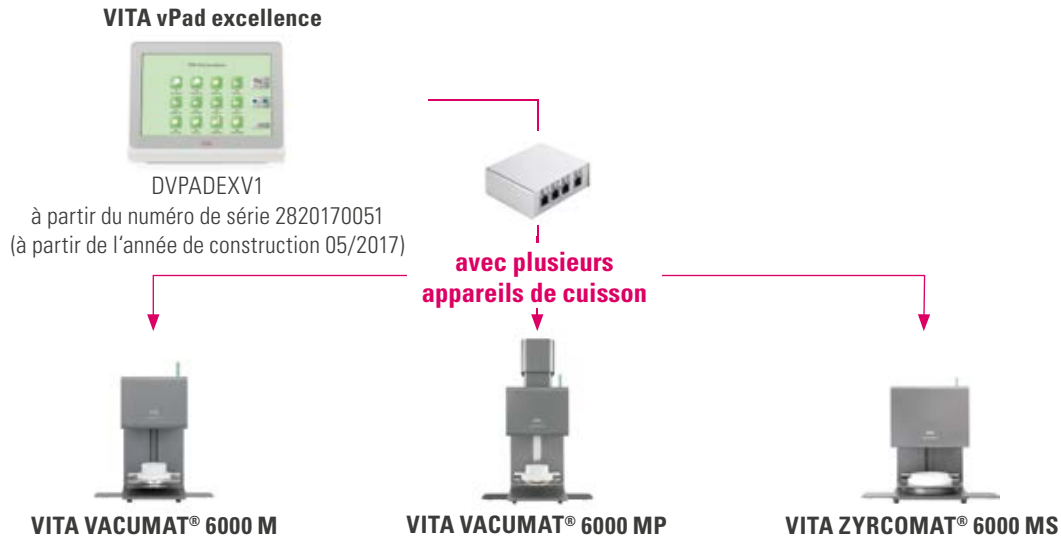

Commande de plusieurs fours

Avec plusieurs appareils de cuisson (= **AVEC boîtier de commutation**) un câble injecteur (n° d'art. D63100) est nécessaire.

La mise en service s'effectue comme suit.



1. Injecteur
2. Câble de connexion (vPad excellence - Injecteur)
3. Câble de connexion (injecteur - boîtier de commutation)
4. Câble de connexion (boîtier de commutation - four)
5. Adaptateur secteur



Injecteur/câble de raccordement
(point jaune + anneau)



Nouveau vPad/câble de raccordement
(point bleu + anneau)



1/6 = Interrupteur marche/arrêt
uniquement pour le vPad, le
four est allumé/éteint via
l'interrupteur principal




Utiliser le raccord du haut
(appareil de cuisson jusqu'à 04/2017)



Utiliser le raccord du haut
(appareil de cuisson à partir du 05/2017)

VITA vPad avec écran 10,1" + appareil de cuisson

(à partir de l'année de construction 05/2017)

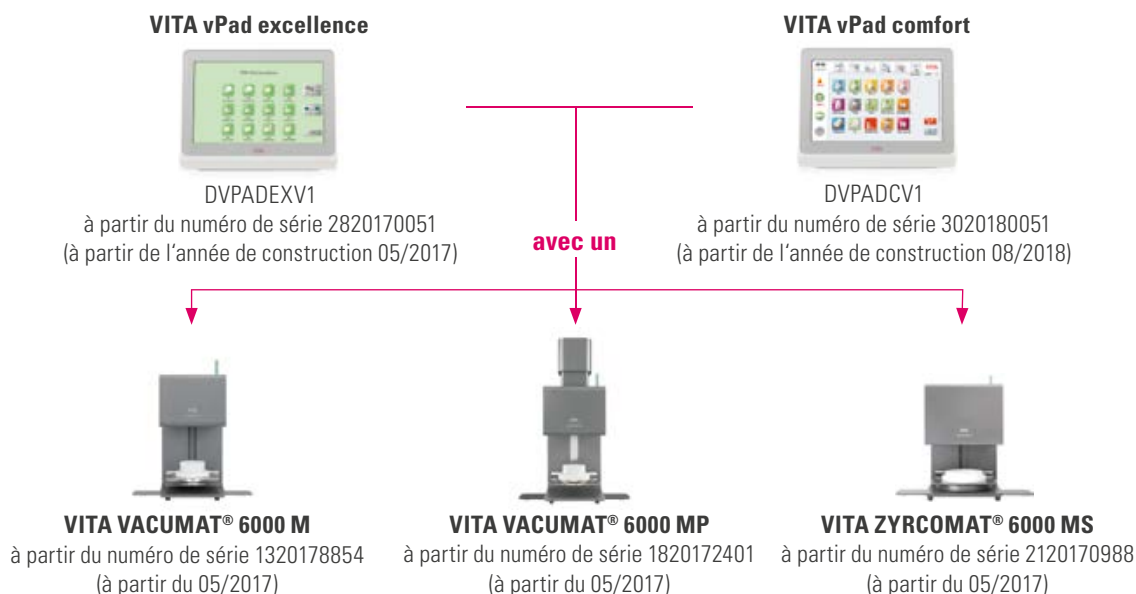

Utilisation individuelle

En cas d'utilisation individuelle (= **SANS boîtier de commutation**, n° d'art. D47009/commande de plusieurs fours), aucun câble injecteur Power n'est nécessaire.

Le vPad est raccordé directement à l'appareil de cuisson.

La mise en service s'effectue comme suit.



Le vPad est raccordé directement à l'appareil de cuisson.



Nouveau vPad/câble de raccordement
(point bleu + anneau)



Appareil de cuisson/câble de raccordement
(point jaune + anneau)



Utiliser le raccord du bas
(appareil de cuisson à partir du 05/2017)

VITA