

VITA SUPRINITY® PC

Cristallizzazione e glasura nel CEREC SpeedFire

- VITA SUPRINITY PC è autorizzato per la cristallizzazione nel CEREC SpeedFire a partire dalla versione SW CEREC 4.4.4 e dalla versione SW CEREC Premium SW 4.4.4.
Sono selezionabili i seguenti programmi:
 - Cristallizzazione
 - Cristallizzazione / GlasuraIl numero max. di 3 corone non deve essere superato.
Attenersi assolutamente alle dimensioni max. della camera di cottura.
Per la cristallizzazione deve essere usato il supporto per glasura in dotazione (Dentsply Sirona).
- Per la glasura di VITA SUPRINITY PC nel CEREC SpeedFire è autorizzato solo VITA AKZENT Plus GLAZE LT SPRAY.
E' selezionabile il seguente programma:
 - GlasuraSi possono eseguire max. 3 cotture di glasura.
Per la glasura deve essere usato il supporto per glasura in dotazione (Dentsply Sirona).
- Per la cristallizzazione / glasura nel CEREC SpeedFire la selezione del programma viene effettuata automaticamente dal CEREC-Software.
- Per la cristallizzazione, la cottura combinata (cristallizzazione/glasura) e la cottura di glasura devono essere usati esclusivamente i supporti CEREC SpeedFire „Glasur Support Single Unit o Glasur Support Multi Unit“ in dotazione.
- Per il fissaggio/posizionamento dei restauri sul supporto di cottura si usa una piccola quantità di CEREC SpeedPaste.
Avvertenza: quanto meno CEREC SpeedPaste si usa, tanto meglio. Tuttavia per evitare il contatto diretto del supporto di cottura con il restauro, è necessario usare un po' di CEREC SpeedPaste per il fissaggio.
- Il restauro posizionato sul supporto di cottura va quindi posto al centro sull'isolamento sportello superiore.
- Per un corretto utilizzo del CEREC SpeedFire leggere e seguire le istruzioni del produttore Sirona Dental Systems.