


VITA vPad com display de 10,1" + Aparelho de queima

(fabricado até 04/2017)

Para a operação do

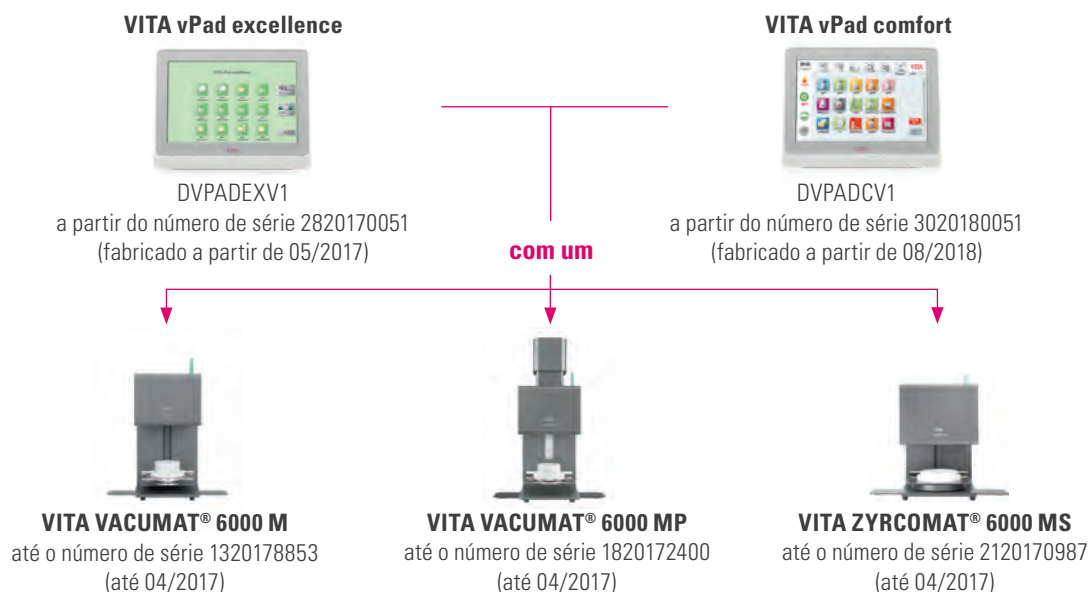

Operação Individual

Em caso de operação individual (= **SEM VITA SWITCHBOX**), é absolutamente necessário o uso de um cabo injetor Power.

Para colocar em funcionamento, proceda da seguinte forma:



1. Injetor
2. Cabo de ligação (vPad excellence - Injetor)
3. Cabo de ligação (Injetor - Forno)
4. Adaptador AC



Cabo Injetor/de ligação
(ponto amarelo + anel)



Novo vPad/Cabo de ligação
(ponto azul + anel)



1/5 = Interruptor liga/desliga apenas
para o vPad, o forno será Interruptor
principal ligado/desligado



Utilizado através da conexão superior
(fabricado até 04/2017)

VITA vPad excellence com display de 10,1" + VITA SWITCHBOX + Aparelhos de queima

(todos os modelos)

Para operação do

VITA vPad excellence



DVPADEXV1
a partir do número de série 2820170051
(fabricado a partir de 05/2017)



com dois ou mais



VITA VACUMAT® 6000 M



VITA VACUMAT® 6000 MP



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS


Controle multifornos

Com dois ou mais aparelhos de queima do modelo VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP e VITA ZYRCOMAT 6000 MS através de um **VITA SWITCHBOX** (art. n.º D47009/Controle multifornos) é necessário um cabo injetor (art. n.º D63100).

Para colocar em funcionamento, proceda da seguinte forma:



1. Injetor
2. Cabo de ligação (vPad excellence - Injetor)
3. Cabo de ligação (Injetor - SWITCHBOX)
4. Cabo de conexão (SWITCHBOX - Forno)
5. Adaptador AC

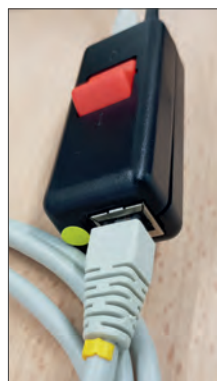

Cabo Injetor/de ligação
(ponto amarelo + anel)



Novo vPad/Cabo de ligação
(ponto azul + anel)



1/6 = Interruptor liga/desliga apenas
para o vPad, o forno será Interruptor
principal ligado/desligado



Utilizado através da conexão superior
(fabricado até 04/2017)



Utilizado através da conexão superior
(fabricado a partir de 05/2017)

VITA