

# VITA vPad avec écran 10,1" + appareil de cuisson

(à partir de l'année de construction 05/2017)

## VITA vPad excellence



DVPADEXV1

à partir du numéro de série 2820170051  
(à partir de l'année de construction 05/2017)

## VITA vPad comfort



DVPADCV1

à partir du numéro de série 3020180051  
(à partir de l'année de construction 08/2018)

avec un



**VITA VACUMAT® 6000 M**

à partir du numéro de série 1320178854  
(à partir du 05/2017)



**VITA VACUMAT® 6000 MP**

à partir du numéro de série 1820172401  
(à partir du 05/2017)



**VITA ZYRCOMAT® 6000 MS**

à partir du numéro de série 2120170988  
(à partir du 05/2017)

## Utilisation individuelle

En cas d'utilisation individuelle (= **SANS boîtier de commutation**, n° d'art. D47009/commande de plusieurs fours), aucun câble injecteur Power n'est nécessaire.

Le vPad est raccordé directement à l'appareil de cuisson.

La mise en service s'effectue comme suit.



Le vPad est raccordé directement à l'appareil de cuisson.



Nouveau vPad/câble de raccordement  
(point bleu + anneau)



Appareil de cuisson/câble de raccordement  
(point jaune + anneau)



Utiliser le raccord du bas  
(appareil de cuisson à partir du 05/2017)

# VITA vPad avec écran 10,1" + appareil de cuisson

(jusqu'à l'année de construction 04/2017)

## Pour l'utilisation du

### VITA vPad excellence



DVPADEXV1

à partir du numéro de série 2820170051  
(à partir de l'année de construction 05/2017)

### VITA vPad confort



DVPADCV1

à partir du numéro de série 3020180051  
(à partir de l'année de construction 08/2018)

avec un



**VITA VACUMAT® 6000 M**

jusqu'au numéro de série 1320178853  
(jusqu'à 04/2017)



**VITA VACUMAT® 6000 MP**

jusqu'au numéro de série 1820172400  
(jusqu'à 04/2017)



**VITA ZYRCOMAT® 6000 MS**

jusqu'au numéro de série 2120170987  
(jusqu'à 04/2017)

## Utilisation individuelle

En cas d'utilisation individuelle (= **SANS boîtier de commutation**), un câble injecteur Power est impératif.

La mise en service s'effectue comme suit.



1. Injecteur
2. Câble de connexion (vPad excellence - injecteur)
3. Câble de connexion (injecteur - four)
4. Adaptateur secteur



Injecteur/câble de  
raccordement  
(point jaune + anneau)



Nouveau vPad/câble de raccordement  
(point bleu + anneau)



1/5 = Interrupteur marche/arrêt  
uniquement pour le vPad, le  
four est allumé/éteint via  
l'interrupteur principal



Utiliser le raccord du haut  
(appareil de cuisson jusqu'à 04/2017)

**VITA**