

VITA vPad avec écran 10,1" + appareil de cuisson

(à partir de l'année de construction 05/2017)

VITA vPad excellence



DVPADEXV1

à partir du numéro de série 2820170051
(à partir de l'année de construction 05/2017)

VITA vPad comfort



DVPADCV1

à partir du numéro de série 3020180051
(à partir de l'année de construction 08/2018)

avec un



VITA VACUMAT® 6000 M

à partir du numéro de série 1320178854
(à partir du 05/2017)



VITA VACUMAT® 6000 MP

à partir du numéro de série 1820172401
(à partir du 05/2017)



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

à partir du numéro de série 2120170988
(à partir du 05/2017)

Utilisation individuelle

En cas d'utilisation individuelle (= **SANS boîtier de commutation**, n° d'art. D47009/commande de plusieurs fours), aucun câble injecteur Power n'est nécessaire.

Le vPad est raccordé directement à l'appareil de cuisson.

La mise en service s'effectue comme suit.



Le vPad est raccordé directement à l'appareil de cuisson.



Nouveau vPad/câble de raccordement
(point bleu + anneau)



Appareil de cuisson/câble de
raccordement
(point jaune + anneau)




Utiliser le raccord du bas
(appareil de cuisson à partir du 05/2017)

VITA vPad excellence avec écran 10,1" + boîtier de commutation + appareils de cuisson

(toutes les années de construction)

Pour l'utilisation du

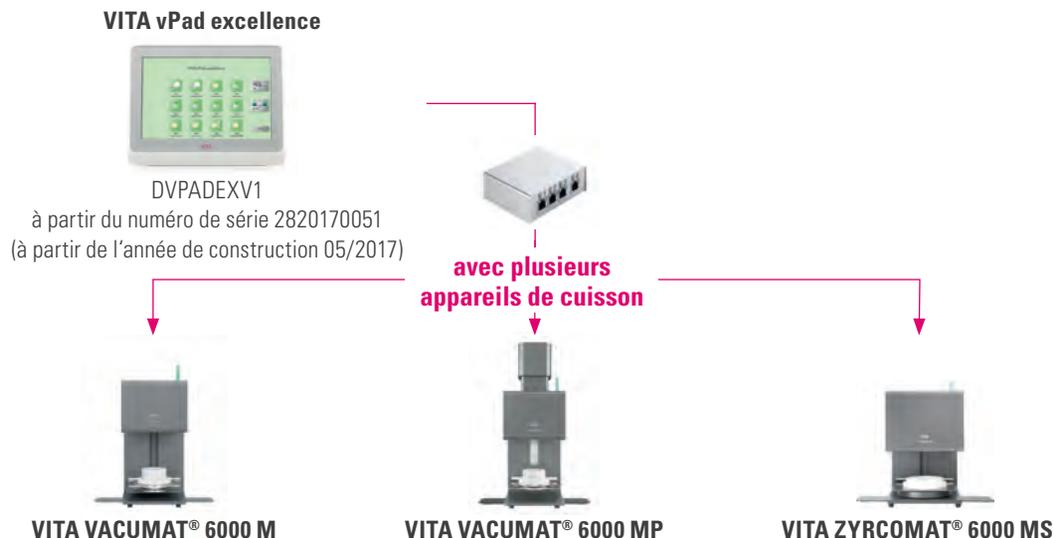

Commande de plusieurs fours

Avec plusieurs appareils de cuisson (= **AVEC boîtier de commutation**) un câble injecteur (n° d'art. D63100) est nécessaire.

La mise en service s'effectue comme suit.



1. Injecteur
2. Câble de connexion (vPad excellence - Injecteur)
3. Câble de connexion (injecteur - boîtier de commutation)
4. Câble de connexion (boîtier de commutation - four)
5. Adaptateur secteur



Injecteur/câble de raccordement (point jaune + anneau)



Nouveau vPad/câble de raccordement (point bleu + anneau)



1/6 = Interrupteur marche/arrêt uniquement pour le vPad, le four est allumé/éteint via l'interrupteur principal



Utiliser le raccord du haut (appareil de cuisson jusqu'à 04/2017)



Utiliser le raccord du haut (appareil de cuisson à partir du 05/2017)

VITA vPad avec écran 10,1" + appareil de cuisson

(jusqu'à l'année de construction 04/2017)

Pour l'utilisation du

VITA vPad excellence



DVPADEXV1

à partir du numéro de série 2820170051
(à partir de l'année de construction 05/2017)

VITA vPad comfort



DVPADCV1

à partir du numéro de série 3020180051
(à partir de l'année de construction 08/2018)

avec un



VITA VACUMAT® 6000 M

jusqu'au numéro de série 1320178853
(jusqu'à 04/2017)



VITA VACUMAT® 6000 MP

jusqu'au numéro de série 1820172400
(jusqu'à 04/2017)



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

jusqu'au numéro de série 2120170987
(jusqu'à 04/2017)

Utilisation individuelle

En cas d'utilisation individuelle (= **SANS boîtier de commutation**), un câble injecteur Power est impératif.

La mise en service s'effectue comme suit.



1. Injecteur
2. Câble de connexion (vPad excellence - injecteur)
3. Câble de connexion (injecteur - four)
4. Adaptateur secteur



Injecteur/câble de
raccordement
(point jaune + anneau)



Nouveau vPad/câble de raccordement
(point bleu + anneau)



1/5 = Interrupteur marche/arrêt
uniquement pour le vPad, le
four est allumé/éteint via
l'interrupteur principal



Utiliser le raccord du haut
(appareil de cuisson jusqu'à 04/2017)

VITA