

VITA vPad com display da 10,1" + Aparelho de queima

(fabricado a partir de 05/2017)

Para a operação do

VITA vPad excellence



DVPADEXV1

a partir do número de série 2820170051
(fabricado a partir de 05/2017)

VITA vPad comfort



DVPADCV1

a partir do número de série 3020180051
(fabricado a partir de 08/2018)

com um



VITA VACUMAT® 6000 M

a partir do número de série 1320178854
(a partir de 05/2017)



VITA VACUMAT® 6000 MP

a partir do número de série 1820172401
(a partir de 05/2017)



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

a partir do número de série 2120170988
(a partir de 05/2017)

Operação Individual

Em caso de operação individual (= **SEM VITA SWITCHBOX**), o uso de um cabo injetor Power é desnecessário.

O vPad é conectado diretamente no aparelho de queima.

Para colocar em funcionamento, proceda da seguinte forma:



O vPad é conectado diretamente no aparelho de queima.



Novo vPad/Cabo de ligação
(ponto azul + anel)



Aparelho de queima/Cabo de ligação
(ponto amarelo + anel)



Utilizado através da conexão inferior
(fabricado a partir de 05/2017)

VITA vPad excellence com display de 10,1" + VITA SWITCHBOX + Aparelhos de queima

(todos os modelos)

Para operação do

VITA vPad excellence



DVPADEXV1
a partir do número de série 2820170051
(fabricado a partir de 05/2017)



com dois ou mais



VITA VACUMAT® 6000 M



VITA VACUMAT® 6000 MP



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

Controle multifornos

Com dois ou mais aparelhos de queima do modelo VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP e VITA ZYRCOMAT 6000 MS através de um **VITA SWITCHBOX** (art. n.º D47009/Controle multifornos) é necessário um cabo injetor (art. n.º D63100).

Para colocar em funcionamento, proceda da seguinte forma:



1. Injetor
2. Cabo de ligação (vPad excellence - Injetor)
3. Cabo de ligação (Injetor - SWITCHBOX)
4. Cabo de conexão (SWITCHBOX - Forno)
5. Adaptador AC



Cabo Injetor/de ligação
(ponto amarelo + anel)



Novo vPad/Cabo de ligação
(ponto azul + anel)



1/6 = Interruptor liga/desliga apenas
para o vPad, o forno será Interruptor
principal ligado/desligado



Utilizado através da conexão superior
(fabricado até 04/2017)




Utilizado através da conexão superior
(fabricado a partir de 05/2017)

VITA vPad com display de 10,1" + Aparelho de queima

(fabricado até 04/2017)

Para a operação do

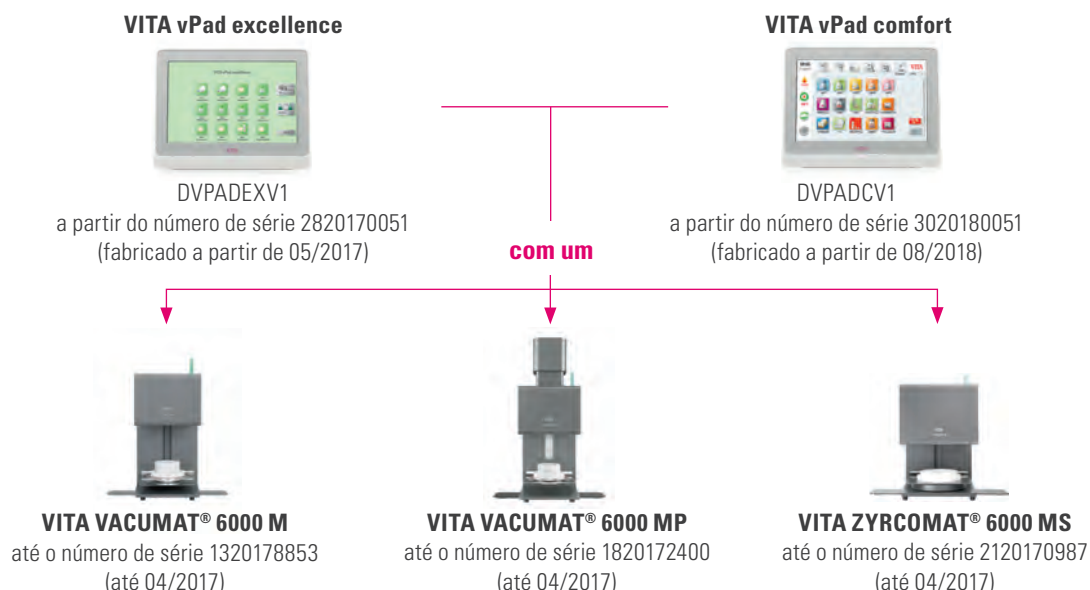

Operação Individual

Em caso de operação individual (= **SEM VITA SWITCHBOX**), é absolutamente necessário o uso de um cabo injetor Power.

Para colocar em funcionamento, proceda da seguinte forma:



1. Injetor
2. Cabo de ligação (vPad excellence - Injetor)
3. Cabo de ligação (Injetor - Forno)
4. Adaptador AC



Cabo Injetor/de ligação
(ponto amarelo + anel)



Novo vPad/Cabo de ligação
(ponto azul + anel)



1/5 = Interruptor liga/desliga apenas
para o vPad, o forno será Interruptor
principal ligado/desligado



Utilizado através da conexão superior
(fabricado até 04/2017)

VITA