


# VITA vPad excellence mit 10,1"- Display + VITA SWITCHBOX + Brenngeräte

(alle Baujahre)

## Zum Betrieb des

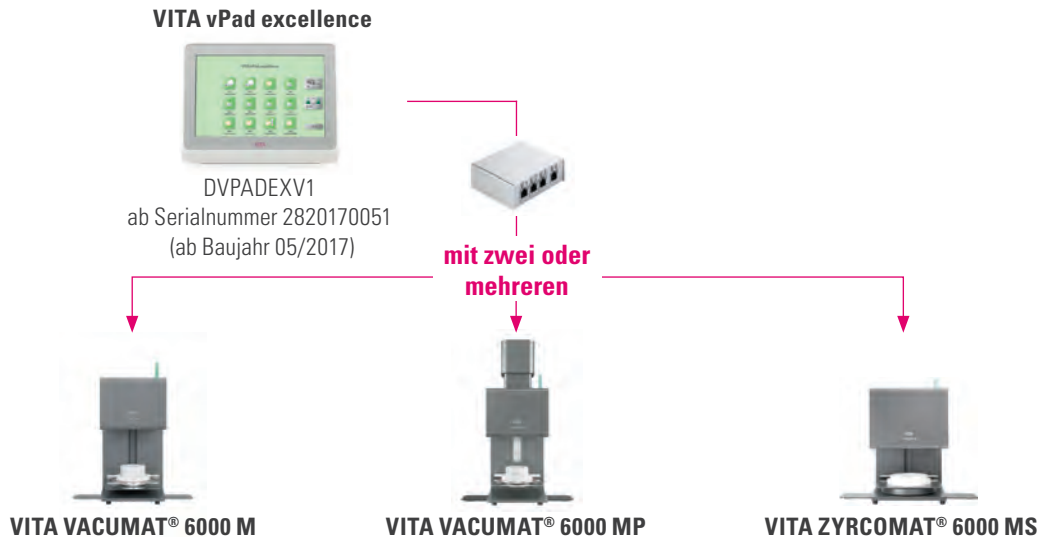

## Mehrfen - Steuerung

In der Mehrfen-Steuerung (= MIT VITA SWITCHBOX, Art.-Nr. D47009) ist ein Injektorkabel (Art.-Nr. D63100) erforderlich.

Zur Inbetriebnahme wie folgt vorgehen:



1. Injektor
2. Verbindungskabel (vPad excellence – Injektor)
3. Verbindungskabel (Injektor – SWITCHBOX)
4. Verbindungskabel (SWITCHBOX – Ofen)
5. Netzadapter



Injektor / Anschlusskabel  
(gelber Punkt + Ring)



Neues vPad / Anschlusskabel  
(blauer Punkt + Ring)



1/6 = Einschalter / Ausschalter nur für das vPad, Ofen wird über Hauptschalter ein-/ausgeschaltet



Oberer Anschluss verwenden  
(Brenngerät bis 04/2017)



Oberer Anschluss verwenden  
(Brenngerät ab 05/2017)

**VITA**