

VITA vPad excellence con pantalla de 10,1" + VITA SWITCHBOX + aparatos de cocción

(todos los años de fabricación)

Para la utilización del

VITA vPad excellence



con dos o más



VITA VACUMAT® 6000 M



VITA VACUMAT® 6000 MP



VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

Control multihorno

Con dos o más aparatos de cocción de los modelos VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP y VITA ZYRCOMAT 6000 MS mediante una **VITA SWITCHBOX** (ref. D47009/control multihorno) se requiere un cable inyector (ref. D63100).

Para la puesta en servicio se debe proceder de la siguiente manera:



1. Inyector
2. Cabo de conexión (vPad excellence - inyector)
3. Cabo de conexión (inyector - SWITCHBOX)
4. Cable de conexión (SWITCHBOX - horno)
5. Adaptador de red



Inyector/cable de conexión
(punto + anillo amarillos)



Nuevo vPad/cable de conexión
(punto + anillo azules)



1/6 = Interruptor de encendido/apagado solo para el vPad; el horno se enciende/apaga mediante el interruptor principal



Utilizar la conexión superior
(fabricado hasta 04/2017)



Utilizar la conexión superior
(aparato de cocción a partir del año de fabricación 05/2017)

VITA