

VITAVM.11

Informazione prodotto



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 02.19

VITA – perfect match.

VITA

Ceramica a struttura microfine per l'individualizzazione di restauri in vetroceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio (ZLS) VITA SUPRINITY PC.



Fig. 1: masse effetto VITA VM 11

Ceramica a struttura microfine per l'individualizzazione di VITA SUPRINITY PC

VITA VM 11 è una ceramica feldspatica a struttura microfine, a basso punto di fusione, sviluppata specialmente per l'individualizzazione di restauri in ceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio (ZLS).

La nuova generazione di vetroceramiche pone nuovi requisiti al CET delle ceramiche di rivestimento estetico. Il perfetto adattamento dei coefficienti di espansione termica del materiale strutturale e di rivestimento estetico garantisce un legame eccellente e risultati sicuri per un rivestimento privo di distorsioni e soggetto a tensioni minime.

Vantaggi del prodotto

Restauri altamente estetici:

L'elevata traslucenza e la calda cromaticità di VITA VM 11 insieme all'effetto opalescente di VITA SUPRINITY PC assicurano risultati altamente estetici e giochi cromatici vitali.

Legame sicuro:

L'adattamento ottimale dei due CET garantisce un legame sicuro e privo di tensioni.



Fig. 2

Molabilità e lucidabilità eccellenti:

Grazie all'affermata struttura microfine di VITA VM 11 si conseguono superfici lisce, compatte, facilmente molabili e rapidamente lucidabili.

Lavorazione semplice:

Resistenza eccellente, retrazione minima ed elevata stabilità degli spigoli contraddistinguono VITA VM 11. In combinazione con VITA SUPRINITY PC, per l'elevata bagnabilità superficiale della nuova vetroceramica, la stratificazione non richiede cotture di Liner o wash.



Fig. 3

Stabilità di cottura superiore:

VITA VM 11 assicura caratteristiche di cottura superiori e resta stabile anche dopo numerose cotture.



Fig. 4

Le fotografie 2 - 4 sono state realizzate con il gentile contributo dell'odontotecnico Master Heike Assmann.

* utilizzabile anche per CELTRA[®] Duo e CELTRA[®] CAD FC.
CELTRA è un marchio registrato della DeguDent GmbH.



Assortimenti

VITAVM®11 DENTINE KIT 3D-MASTER, BV11DK

Q.tà	Contenuto	Materiale
6	12 g	TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Istruzioni di impiego

VITAVM®11 DENTINE KIT classical, BV11DKC

Q.tà	Contenuto	Materiale
8	12 g	TRANSPA DENTINE A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Istruzioni di impiego

VITAVM®11 CREATIVE KIT, BV11CKV1

Q.tà	Contenuto	Materiale
3	12 g	SUN DENTINE SD1-SD3
2	12 g	MAMELON MM1, MM3
7	12 g	EFFECT ENAMEL EE1, EE3, EE5, EE7, EE8, EE9, EE11
3	12 g	EFFECT CHROMA EC1, EC5, EC11
1	12 g	EFFECT PEARL EP1
4	12 g	EFFECT OPAL EO1-EO3, EO5
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL, NT
1	12 g	WINDOW, WIN
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
2		Guide colori VITA VM 11
		Istruzioni di impiego


Confezioni singole

VITAVM®11

Colore	Materiale	Contenuto	Codice
0M1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906112
1M1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906412
1M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906512
2M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906912
3M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4907612
4M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4908312
A1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945112
A2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945212
A3	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945312
A3.5	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945412
B2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945712
C2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4946112
D2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4946412
WIN	WINDOW	12 g	B4918112
NT	NEUTRAL	12 g	B4920112
ENL	ENAMEL light	12 g	B4919112
END	ENAMEL dark	12 g	B4919212
MM1	MAMELON	12 g	B4916112
MM3	MAMELON	12 g	B4916312

Colore	Materiale	Contenuto	Codice
EP1	EFFECT PEARL	12 g	B4915112
EO1	EFFECT OPAL	12 g	B4917112
EO2	EFFECT OPAL	12 g	B4917212
EO3	EFFECT OPAL	12 g	B4917312
EO5	EFFECT OPAL	12 g	B4917512
EC1	EFFECT CHROMA	12 g	B4912112
EC5	EFFECT CHROMA	12 g	B4912512
EC11	EFFECT CHROMA	12 g	B4913112
EE1	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909112
EE3	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909312
EE5	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909512
EE7	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909712
EE8	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909812
EE9	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909912
EE11	EFFECT ENAMEL	12 g	B4910112
SD1	SUN DENTINE	12 g	B4936112
SD2	SUN DENTINE	12 g	B4936212
SD3	SUN DENTINE	12 g	B4936312

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

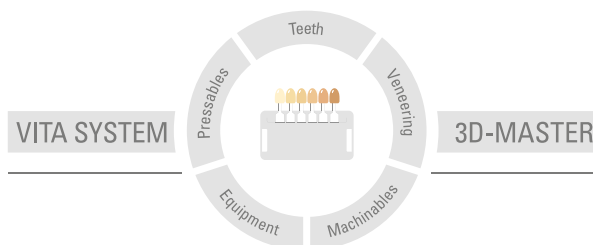

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 02.19

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati **CE** 0124:

VITA **VM11** · VITA **SUPRINITY® PC**

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik