

# VITA AKZENT® Plus

Instrucciones de uso breves: GLAZE/GLAZE LT



Glaseados y maillajes para cerámica independientes del CET para barnizar, colorear y glasear.

VITA – perfect match.

**VITA**

## > Datos y características

---


### **Los maquillajes y glaseados VITA AKZENT Plus son:**

- Maquillajes para cerámica independientes del CET para todas las cerámicas de recubrimiento habituales, cerámicas de circonio, de silicato o de feldespato monolíticas
- Para barnizar, colorear y glasear
- Para sellar la superficie de la cerámica

### **Ventajas de VITA AKZENT Plus:**

- Ajuste sencillo del cromatismo en los grupos de colores correspondientes
- Propiedades de manipulación óptimas, como por ejemplo, facilidad de aplicación
- Resultados altamente estéticos gracias a la coloración de la superficie

### **COMPONENTES DEL SISTEMA**

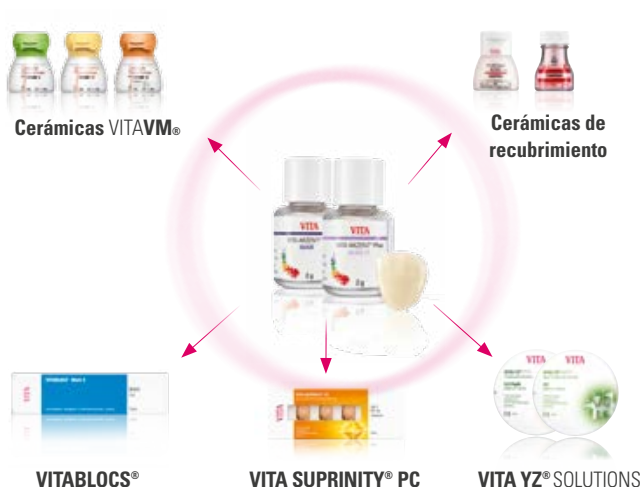

## > 1. VITA AKZENT® Plus – GLAZE/GLAZE LT

### Utilización de GLAZE/GLAZE LT



1



2

### Instrucciones de uso:

#### Aplicación de GLAZE

- El polvo se mezcla con POWDER FLUID hasta obtener una consistencia cremosa.
- Aplicar el material para glasear con la ayuda de un pincel sobre toda la superficie de la restauración, en una capa uniforme y cubriente.
- Colocar la corona a glasear en el soporte de cocción.
- Colocar la restauración con el soporte de cocción en el centro del horno y cocerla empleando el programa adecuado (en función del material de sustrato).

### Proceso de cocción recomendado

	Presec. °C	min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. °C, prox.	min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ SOLUTIONS	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-

Para cocer otros materiales, la norma general es:

En caso de temperaturas de cocción ≤ 850 °C recomendamos utilizar GLAZE LT;  
con temperaturas > 850 °C se pueden utilizar todos los materiales de glasear.

## >2. Gama de productos

---

### **EFFECT STAINS**

- Colores especialmente cromáticos y cubrientes.
- Para la reproducción de tonos cromáticos personalizados y ajustes cromáticos de cualquier característica de color natural.
- Aplicados en una capa gruesa, cubren por completo el color básico subyacente.

### **BODY STAINS**

- Materiales translúcidos de aplicación en capa fina, que actúan como un delgado filtro de color sobre el material de base.
- Alteraciones y desviaciones del color hacia un tono rojizo, amarillento, naranja, pardusco o gris verdoso.

### **CHROMA STAINS**

- Colores de aplicación en capa fina para modificar la cromaticidad del material de base dentro de un grupo de colores.

### **GLAZE**

- Material de glasear para obtener una superficie brillante, vítrea, homogénea y cerrada tras la cocción.

### **GLAZE LT**

- LT = Low Temperature: material para glasear de bajo punto de fusión, para materiales cerámicos con temperaturas de cocción inferiores a 800 °C.

### **FINISHING AGENT**

- Proporciona una textura natural de la superficie con un brillo mate.

### **FLUOGLAZE LT SPRAY**

- Para una fluorescencia natural y glaseado en un solo paso.

## > 3. Colores disponibles

VITA AKZENT Plus

### EFFECT STAINS

ES01		blanco	ES06		rojo óxido	ES11		azul
ES02		crema	ES07		caqui	ES12		azul grisáceo
ES03		amarillo limón	ES08		rosa	ES13		gris
ES04		amarillo sol	ES09		rojo oscuro	ES14		negro
ES05		naranja	ES10		lila			

### BODY STAINS

BS01		amarillo
BS02		marrón amarillento
BS03		naranja
BS04		gris oliva
BS05		marrón grisáceo

### CHROMA STAINS

#### VITA classical A1–D4

CSA		rojizo-pardusco
CSB		rojizo-amarillento
CSC		grisáceo
CSD		grisáceo-rojizo

#### VITA SYSTEM 3D-MASTER

CSL		amarillento
CSM2		amarillento-rojizo
CSM3		amarillo-rojo
CSR		rojizo
CSIO		naranja

### GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FINISHING AGENT
- FLUOGLAZE LT

## > Línea de atención permanente y asistencia

---

 Estaremos encantados de ayudarle

### ▶ Línea directa de asistencia técnica

Si desea realizar consultas técnicas sobre los productos de VITA, no dude en ponerse en contacto con nuestros asesores técnicos Ralf Mehlin o Daniel Schneider.

**Teléfono: +49 (0) 7761 / 56 22 22**

**Fax: +49 (0) 7761 / 56 24 46**

**De 8:00 a 17:00 horas CET**

**E-mail: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**

**Encontrará más datos de contacto internacionales en**  
**[www.vita-zahnfabrik.com/contacts](http://www.vita-zahnfabrik.com/contacts)**

### ▶ Asistencia online

¿Tiene preguntas en torno a la elaboración y las soluciones de producto? Encontrará respuestas competentes online en forma de Preguntas frecuentes, vídeos y unidades didácticas electrónicas.

También encontrará más información detallada en las instrucciones de uso completas de VITA AKZENT Plus.

**[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**

**[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)**

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)