

VITACOLL® Agente adhesivo para dientes de resina Promotores de aderência VITACOLL® para dentes de acrílico

a. Preparación de los dientes de resina

(antes de la transferencia a resina para base de prótesis)

Preparação dos dentes de acrílico

(antes da transferência para o acrílico base da prótese)





E Limpiar los dientes con agua hirviendo (2) y eliminar completamente la cera y las impurezas (1).

P Limpar os dentes com água a ferver (2) e deixá-los completamente livres de cera e impurezas (1).



E Rugosificar las zonas basales (3) y las circunferencias cervicales (4-6) de los dientes mediante chorro de polvo o utilizando una fresa.

P Polir as áreas do dente basal (3) e cervical-circular (4-6) com jatos de pó ou com uma fresa.

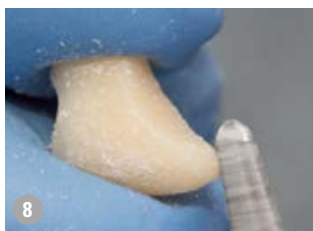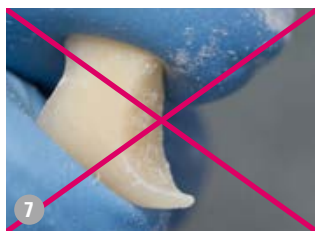

E Redondear (8) los bordes afilados (7), evitando las retenciones perforadas (9/10) a fin de prevenir fracturas dentales.

P Arredondar as arestas afiadas (7) (8), evitar retenções nos orifícios (9/10) para prevenir fraturas dentárias.

b. Aplicación de VITACOLL® para una prótesis parcial o completa

Aplicação de VITACOLL® para uma prótese parcial ou total



E Aplicar líquido VITACOLL® de modo uniforme sobre las superficies dentales rugosificadas hasta obtener un brillo satinado mate homogéneo (11); si fuera preciso, aplicar una nueva capa de VITACOLL® (12).

P O líquido VITACOLL® é uniformemente aplicado às superfícies dos dentes rugosas até formar um brilho homogêneo, suave e sedoso (11) - se necessário, umedeça novamente com VITACOLL® (12).



Tiempo de actuación de VITACOLL
Tiempo de reação de VITACOLL

E Tras la aplicación de VITACOLL®, dejar que actúe durante 5 minutos.


Advertencia: A continuación se deberán fijar los dientes de resina en la resina de la base de la prótesis antes de transcurridos **10 minutos**, a fin de garantizar la suficiente adherencia.

Una vez transcurridos 10 minutos, se reduce el efecto de VITACOLL®, en cuyo caso deberá volver a comenzar desde el apartado b. "Aplicación de VITACOLL®".

P Após a aplicação, permitir que VITACOLL® aja por 5 minutos.

Aviso: em seguida, os dentes de acrílico deverão estar no acrílico da base da prótese, dentro de **10 min.**, a fim de garantir um efeito de adesão suficiente.

Se os 10 minutos foram excedidos, o efeito de VITACOLL® será reduzido e você deve retornar ao ponto b. „Aplicação de VITACOLL®“.

 Consultar las instrucciones de uso.
Leia as manual de instruções.

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen
Germany · Allemagne · Alemania · Germania
Tel. +49 (0)7761/562-0 · Fax +49 (0)7761/562-299
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik

CE 0124 