

## VITACOLL® Agente adhesivo para dientes de resina Promotores de aderência VITACOLL® para dentes de acrílico

### a. Preparación de los dientes de resina

(antes de la transferencia a resina para base de prótesis)

### Preparação dos dentes de acrílico

(antes da transferência para o acrílico base da prótese)




**E** Limpiar los dientes con agua hirviendo (2) y eliminar completamente la cera y las impurezas (1).

**P** Limpar os dentes com água a ferver (2) e deixá-los completamente livres de cera e impurezas (1).



**E** Rugosificar las zonas basales (3) y las circunferencias cervicales (4-6) de los dientes mediante chorro de polvo o utilizando una fresa.

**P** Polir as áreas do dente basal (3) e cervical-circular (4-6) com jatos de pó ou com uma fresa.

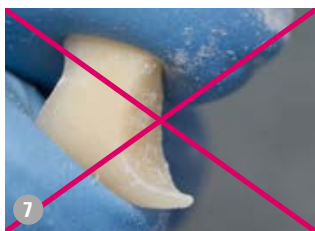

**E** Redondear (8) los bordes afilados (7), evitando las retenciones perforadas (9/10) a fin de prevenir fracturas dentales.

**P** Arredondar as arestas afiadas (7) (8), evitar retenções nos orifícios (9/10) para prevenir fraturas dentárias.

## b. Aplicación de VITACOLL® para una prótesis parcial o completa

### Aplicação de VITACOLL® para uma prótese parcial ou total



**E** Aplicar líquido VITACOLL® de modo uniforme sobre las superficies dentales rugosificadas hasta obtener un brillo satinado mate homogéneo (11); si fuera preciso, aplicar una nueva capa de VITACOLL® (12).

**P** O líquido VITACOLL® é uniformemente aplicado às superfícies dos dentes rugosas até formar um brilho homogêneo, suave e sedoso (11) - se necessário, umedeça novamente com VITACOLL® (12).



**Tiempo de actuación de VITACOLL**  
**Tiempo de reação de VITACOLL**

**E** Tras la aplicación de VITACOLL®, dejar que actúe durante 5 minutos.

**Advertencia:** A continuación se deberán fijar los dientes de resina en la resina de la base de la prótesis antes de transcurridos **10 minutos**, a fin de garantizar la suficiente adherencia.

Una vez transcurridos 10 minutos, se reduce el efecto de VITACOLL®, en cuyo caso deberá volver a comenzar desde el apartado b. "Aplicación de VITACOLL®".

**P** Após a aplicação, permitir que VITACOLL® aja por 5 minutos.

**Aviso:** em seguida, os dentes de acrílico deverão estar no acrílico da base da prótese, dentro de **10 min.**, a fim de garantir um efeito de adesão suficiente.

Se os 10 minutos foram excedidos, o efeito de VITACOLL® será reduzido e você deve retornar ao ponto b. „Aplicação de VITACOLL®“.



Consultar las instrucciones de uso.  
Leia as instruções de processamento.

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen  
Germany · Allemagne · Alemania · Germania  
Tel. +49 (0)7761/562-0 · Fax +49 (0)7761/562-299  
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com  
facebook.com/vita.zahnfabrik

CE 0124