

## VITACOLL® adhésif pour dents en résine VITACOLL® Adesivo per denti in resina

### a. Préparation des dents en résine

(avant le transfert dans la résine de base de la prothèse)

### Preparazione dei denti in resina

(prima del trasferimento in materiale per basi di protesi)




**F** Nettoyer les dents dans l'eau bouillante (2) et éliminer complètement tout résidu de cire et toute impureté (1).

**I** Pulire i denti con acqua bollente (2) ed eliminare completamente cera e altre impurità (1).



**F** Meuler ou sabler les zones basales (3) et cervicales circulaires (4-6) des dents.

**I** Irruvidire le aree basali (3) e cervicali-circolari (4-6) dei denti mediante sabbatura o con una fresa.

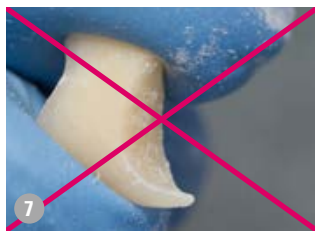

**F** Arrondir (8) les arêtes vives (7) et éviter les trous de rétention (9/10) afin d'éviter des fractures des dents.

**I** Arrotondare (8) bordi a spigolo vivo (7) ed evitare ritenzioni a foro (9/10) per impedire fratture dei denti.

## b. Application de VITACOLL® pour une prothèse totale ou partielle

### Usò di VITACOLL® per protesi parziali o complete



**F** Appliquer uniformément le liquide VITACOLL® sur les surfaces dentaires meulées jusqu'à obtenir un satiné homogène (11) - si nécessaire, humecter de nouveau avec VITACOLL® (12).

**I** Applicare in modo uniforme il liquido VITACOLL® sulle superfici dentarie irruvidite fino ad ottenere una lucentezza opaco-setosa omogenea (11) - ev. bagnare nuovamente con VITACOLL® (12).



**Durée d'action de VITACOLL**  
**Tempo di azione di VITACOLL**

**F** Après l'application, laisser agir VITACOLL® pendant 5 minutes.


**Avertissement :** les dents en résine doivent ensuite être fixées dans la résine de base de la prothèse dans un délai de **10 min** afin de garantir une adhérence suffisante.

Si le délai de 10 minutes est dépassé, l'efficacité de VITACOLL® diminue, et vous devez recommencer à partir du point b. « Utilisation de VITACOLL® ».

**I** Dopo l'applicazione lasciar agire VITACOLL® per 5 minuti.

**Avvertenza:** al termine del tempo prescritto, fissare i denti nel materiale per basi di protesi **entro 10 minuti**, per garantire un'azione adesiva sufficiente.

Superati i 10 minuti, l'azione di VITACOLL® si riduce e occorre ripetere il trattamento a partire dal punto b. "Usò di VITACOLL®".

 Veuillez consulter le mode d'emploi.  
Leggere le istruzioni di impiego.

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen  
Germany · Allemagne · Alemania · Germania  
Tel. +49 (0)7761/562-0 · Fax +49 (0)7761/562-299  
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com  
 facebook.com/vita.zahnfabrik

CE 0124