

Control de un solo horno

Imagen	Hornos	Número de serie	 VITA vPad excellence (DVPADEXV1) N.º de serie >2820170051	 VITA vPad comfort (DVPADCV1) N.º de serie >3020180051
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Conecte el cable inyector de alimentación del vPad (D63100) al VITA vPad excellence y a la toma de red superior del horno.	✓ Conecte el cable inyector de alimentación del vPad (D63100) al VITA vPad comfort y a la toma de red superior del horno.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400		
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987		
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la toma de red inferior del horno.	✓ Conecte el VITA vPad comfort a la toma de red inferior del horno.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401		
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049	✓	✓
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049		
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx		
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049	✓	✗

Control de varios hornos










(Sin combinar aparatos con año de fabricación anterior y posterior a 2017)



VITA vPad excellence (DVPADCV1)
N.º de serie >2820170051



VITA vPad comfort (DVPADCV1)
N.º de serie >3020180051

Imagen	Hornos	Número de serie	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX I. Conecte la VITA SWITCHBOX I a la toma de red superior del horno. Conecte el cable inyector de alimentación (D63100) a la VITA SWITCHBOX I.	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la VITA SWITCHBOX II a la toma de red superior del horno. Conecte el cable inyector de alimentación (D63100) a la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400				
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX I. Conecte la VITA SWITCHBOX I a la toma de red superior del horno. Conecte el cable inyector de alimentación (D63100) a la VITA SWITCHBOX I.	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la VITA SWITCHBOX II a la toma de red inferior del horno.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✗	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049				
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049	✗	✓	✗	✗
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049				
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx	✗	✓	✗	✗
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049				
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx				

* El aparato del puerto 1 debe estar siempre encendido.

Control multihorno mixto

(Combinando aparatos con año de fabricación anterior y posterior a 2017)



VITA vPad excellence (DVPADCV1)
N.º de serie <2820170051



VITA vPad comfort (DVPADCV1)
N.º de serie <3020180051



VITA vPad excellence (DVPADCV1)
N.º de serie >2820170051



VITA vPad comfort (DVPADCV1)
N.º de serie >3020180051

Imagen	Hornos	Número de serie	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX I.	✓ Conecte el VITA vPad comfort a la VITA SWITCHBOX II.	✓ Conecte el VITA vPad comfort a la VITA SWITCHBOX I.	✓ Conecte el VITA vPad comfort a la VITA SWITCHBOX II.	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX I. Conecte la VITA SWITCHBOX I a la toma de red superior del horno.	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la toma de red superior del horno a los puertos 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400								
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	Conecte la VITA SWITCHBOX I a la toma de red superior del horno.	Conecte la VITA SWITCHBOX II a la toma de red superior del horno.	Conecte la VITA SWITCHBOX I a la toma de red superior del horno.	Conecte la VITA SWITCHBOX II a la toma de red superior del horno.	Conecte el cable inyector de alimentación (D63100) a la VITA SWITCHBOX I.	Conecte la toma de red inferior del horno al puerto 1 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 M/MP (DV6000Mxxx/DV6000MPxxx)	> 1320178854 > 1820172401								
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la toma de red superior del horno a los puertos 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400								
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	< 2120170987	✗	✗	✗	✗	✗	Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la toma de red superior del horno al puerto 1 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3120190049 > 3520240049								
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la toma de red superior del horno a los puertos 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx								
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la toma de red superior del horno a los puertos 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFxxx)	> 3420240049								

* El aparato del puerto 1 debe estar siempre encendido.