

Controle simples de fornos

Imagem	Fornos	Número de série	VITA vPad excellence (DVAPEXV1) Número de série > 2820170051	VITA vPad comfort (DVPADCV1) Número de série > 3020180051
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Conectar o cabo injetor PoE do vPad-(D63100) no VITA vPad excellence e na entrada de rede superior do forno.	✓ Conectar o cabo injetor PoE do vPad-(D63100) no VITA vPad comfort e na entrada de rede superior do forno.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400		
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987		

	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Conectar o VITA vPad excellence na entrada de rede inferior do forno.	✓ Conectar o VITA vPad comfort na entrada de rede inferior do forno.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401		
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✓	✓
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049		
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx		
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049	✓	✗

Controle múltiplo de fornos

(Aparelhos construídos antes de 2017 e depois de 2017 não são misturados)

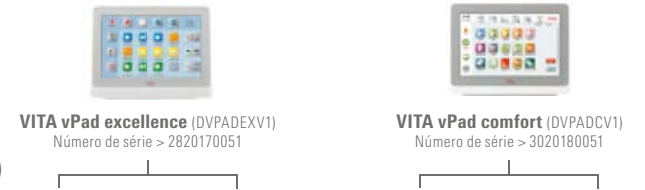


Imagem	Fornos	Número de série	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX I. Conectar o VITA SWITCHBOX I na entrada de rede superior do forno. Conectar o cabo injetor PoE (D63100) no VITA SWITCHBOX I.	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX II. Conectar o VITA SWITCHBOX II na entrada de rede superior do forno. Conectar o cabo injetor PoE (D63100) no VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400				
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX II. Conectar o VITA SWITCHBOX I na entrada de rede superior do forno. Conectar o cabo injetor PoE (D63100) no VITA SWITCHBOX I.	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX II. Conectar o VITA SWITCHBOX II na entrada de rede inferior do forno.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✗	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049				
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✗	✓	✗	✗
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx				
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049				

Aparelho na porta 1 deve estar sempre ligado.

Controle de múltiplos fornos

(Aparelhos construídos antes e depois de 2017)



VITA vPad excellence (DVPADXV1)
Número de série < 2820170051



VITA vPad comfort (DVPADCV1)
Número de série < 3020180051



VITA vPad excellence (DVPADXV1)
Número de série > 2820170051



VITA vPad comfort (DVPADCV1)
Número de série > 3020180051

Imagem	Fornos	Número de série	VITA SWITCHBOX I (D47009)		VITA SWITCHBOX II* (D65000)		VITA SWITCHBOX I (D47009)		VITA SWITCHBOX II* (D65000)		VITA SWITCHBOX I (D47009)		VITA SWITCHBOX II* (D65000)	
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×		
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400	Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX I.	Conectar VITA vPad comfort no VITA SWITCHBOX II.	Conectar VITA vPad comfort no VITA SWITCHBOX I.	Conectar VITA vPad comfort no VITA SWITCHBOX II.	Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX I.	Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX II. Conectar a entrada de rede superior do forno às portas 2-4 do VITA SWITCHBOX II.	Conectar o VITA SWITCHBOX I na entrada de rede superior do forno.	Conectar a entrada de rede inferior do forno com a porta 1 do VITA SWITCHBOX II.				
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987												
	VITA VACUMAT 6000 M/MP (DV6000Mxxx/DV6000MPxxx)	> 1320178854 > 1820172401	Conectar o VITA SWITCHBOX I na entrada de rede superior do forno.	Conectar o VITA SWITCHBOX II na entrada de rede superior do forno.	Conectar o VITA SWITCHBOX I na entrada de rede superior do forno.	Conectar o VITA SWITCHBOX II na entrada de rede superior do forno.	Conectar o VITA SWITCHBOX I na entrada de rede superior do forno.	Conectar o VITA SWITCHBOX II na entrada de rede superior do forno.	Conectar o VITA SWITCHBOX I na entrada de rede superior do forno.	Conectar o cabo injetor PoE (D63100) no VITA SWITCHBOX I.				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853												
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987									Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX II. Conectar a entrada de rede superior do forno às portas 2-4 do VITA SWITCHBOX II.	×	×	
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049									Conectar à porta 1 do VITA SWITCHBOX II.			
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049												
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx									Conectar a entrada de rede inferior do forno com a porta 1 do VITA SWITCHBOX II.			
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049									Conectar a entrada de rede inferior do forno com a porta 1 do VITA SWITCHBOX II.			

* Aparelho na porta 1 deve estar sempre ligado.