

VITA AKZENT® Plus

Informacje o produkcie



VITA ustalenie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Stan z 11.19

VITA – perfect match.

VITA

Optymalnie. Łatwo, wszystko.

Nałożenie powłoki przezświetlającej, zaznaczenie i glazowanie - niezależnie od współczynnika rozszerzalności cieplnej (WRC)

VITA AKZENT® Plus **Optymalnie. Łatwo, Wszystko.**



Więcej możliwości w gabinecie i pracowni

Czy chcecie łatwo i wydajnie barwić, lazurować i glazurować?
Asortyment VITA AKZENT Plus jest na pewno waszym materiałem.

System składający się z farbek lazurujących, znaczących i glazurujących umożliwia
oraz gwarantuje szeroki zakres zastosowania w gabinecie i pracowni.

Materiał można stosować w połączeniu ze wszystkimi ceramikami dentystycznymi
oraz dla każdego WRC.

Nowe kolory, nowe formy użytkowania, nowy zakres zastosowania -
VITA AKZENT Plus umożliwia wolny wybór.

Czy w postaci proszku, pasty lub sprayu, sami Państwo wybieracie w jakiej postaci
i najbardziej wydajnie można zastosować VITA AKZENT Plus.

VITA AKZENT® Plus SPRAY Równomiernie za jednym przyciśnięciem



AKZENT Plus SPRAY KIT		
Zawartość asortymentu		
Produkt	Kolor	Zawartość
BODY SPRAY	BS01 – BS05	5 x 75ml
GLAZE SPRAY		1 x 75ml
GLAZE LT SPRAY		1 x 75ml
FLUOGLAZE LT SPRAY		1 x 75ml
Osprzęt		



Szczególnie przydatny w gabinecie i pracowni, jak np. w celu dopasowania kolorystyki uzupełnienia z ceramiki kolorystycznie jednorodnej. Glazura i lazura w sprayu są gotowe do użycia i łatwe do aplikacji. FLUOGLAZE LT to wysoce fluorescencyjny spray do glazury w celu stworzenia naturalnej fluorescencji.

Korzyści:

- równomierne i łatwe nakładanie dla uzyskania jednolitej powierzchni.
- ukierunkowane napylanie bez utraty materiału dzięki nowej i specjalnej głowicy pyłacej



VITA AKZENT® Plus POWDER **łączy elastyczność i indywidualizm z wydajnością**



AKZENT Plus POWDER KIT Zawartość asortymentu		
Produkt	Kolor	Zawartość
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3g
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3g
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 3g
GLAZE		1 x 5g
GLAZE LT		1 x 5g
FINISHING AGENT		1 x 5g
POWDER FLUID		1 x 20ml
Osprzęt		

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master Zawartość asortymentu		
CHROMA STAINS	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CS10	5 x 4g
POWDER FLUID		1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4 Zawartość asortymentu		
CHROMA STAINS	CSA-CSD	4 x 4g
POWDER FLUID		1 x 20 ml



Masy VITA AKZENT Plus POWDER przeznaczone dla techników dentystycznych, którzy chcą charakteryzować klasyczne ceramiki licujące oraz drobnocząsteczkową ceramikę skaleniową jak np. VITA PM 9.

Korzyści:

- nieograniczona elastyczność i wydajność
- możliwość wzajemnego mieszania mas, w celu uzyskania indywidualnych efektów kolorystycznych.
- łatwe i szybkie dostosowanie efektu kolorystycznego, chromatyczności i natężenie barwy



VITA AKZENT® Plus PASTE **Bardzo szybko i indywidualnie**



AKZENT Plus PASTE KIT Zawartość asortymentu		
Produkt	Kolor	Zawartość
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4g
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4g
GLAZE PASTE		1 x 4g
GLAZE LT PASTE		1 x 4g
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15ml
Osprzęt		

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master Zawartość asortymentu		
CHROMA STAINS PASTE	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4 Zawartość asortymentu		
CHROMA STAINS PASTE	CSA-CSD	4 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15 ml



Farbki w paście VITA AKZENT Plus PASTE nadają się znakomicie do szybkiej, optymalnej i prostej charakteryzacji uzupełnień np. z materiału VITABLOCS

Korzyści:


- gotowa do użytku pasta posiada homogeniczną pigmentację i jednakową konsystencję.
- możliwość wzajemnego mieszania w celu uzyskania indywidualnych efektów kolorystycznych
- możliwość rozcieńczania lub powtórnego mieszania
- łatwe i szybkie dostosowanie efektu kolorystycznego, chromatyczności i natężenie barwy



Płyn VITA AKZENT Plus PASTE FLUID gwarantuje optymalną konsystencję materiału, również w przypadku wyschnięcia pasty.



AKZENT Plus Wybór kolorów Asortyment						
Produkt	Próbki kolorów	Kolor	Nazwa skrócona	Forma branżowa		
				Spray	Powder	Paste
BODY STAINS – przezierne farby – do zmiany oddziaływania koloru materiału podkładowego - jądra		żółty	BS01	✓	✓	✓
		żółto-brązowy	BS02			
		pomarańczowy	BS03			
		oliwkowo-szary	BS04			
		szaro-brązowy	BS05			
CHROMA STAINS classical A1-D4 – półprzezroczyste kolory do zmiany prezentowania się koloru materiału podstawowego w obrębie jednej grupy kolorów		brązowo-czerwonawy	CSA	✓	✓	
		czerwono-żółtawy	CSB			
		szarawy	CSC			
		szaro-czerwonawy	CSD			
CHROMA STAINS 3D-MASTER – półprzezroczyste kolory do zmiany prezentowania się koloru materiału podstawowego w obrębie wybranej grupy jasności		żółtawy	CSL	✓	✓	
		czerwono-żółtawy	CSM2			
		żółto-czerwony	CSM3			
		czerwonawy	CSR			
		pomarańczowy	CSIO			
EFFECT STAINS – farby znaczące i bardzo dobrze kryjące – dla naturalnych efektów na powierzchni uzupełnienia – przeznaczone do barwienia w czasie nakładania warstw ceramiki		biały	ES01	✓	✓	
		kremowy	ES02			
		cytrynowo-żółty	ES03			
		słoneczno-żółty	ES04			
		pomarańczowy	ES05			
		rdzawo-czerwony	ES06			
		khaki	ES07			
		różowy	ES08			
		ciemno-czerwony	ES09			
		liliowy	ES10			
		niebieski	ES11			
		szaro-niebieski	ES12			
		szary	ES13			
		czarny	ES14			
GLAZE – dla homogenicznych, błyszczących powierzchni				✓	✓	✓
GLAZE LT – niskotopliwa masa glazury dla ceramik, których temperatura napalania znajduje się poniżej 800°C				✓	✓	✓
FINISHING AGENT – dla jedwabście-matowych powierzchni					✓	✓

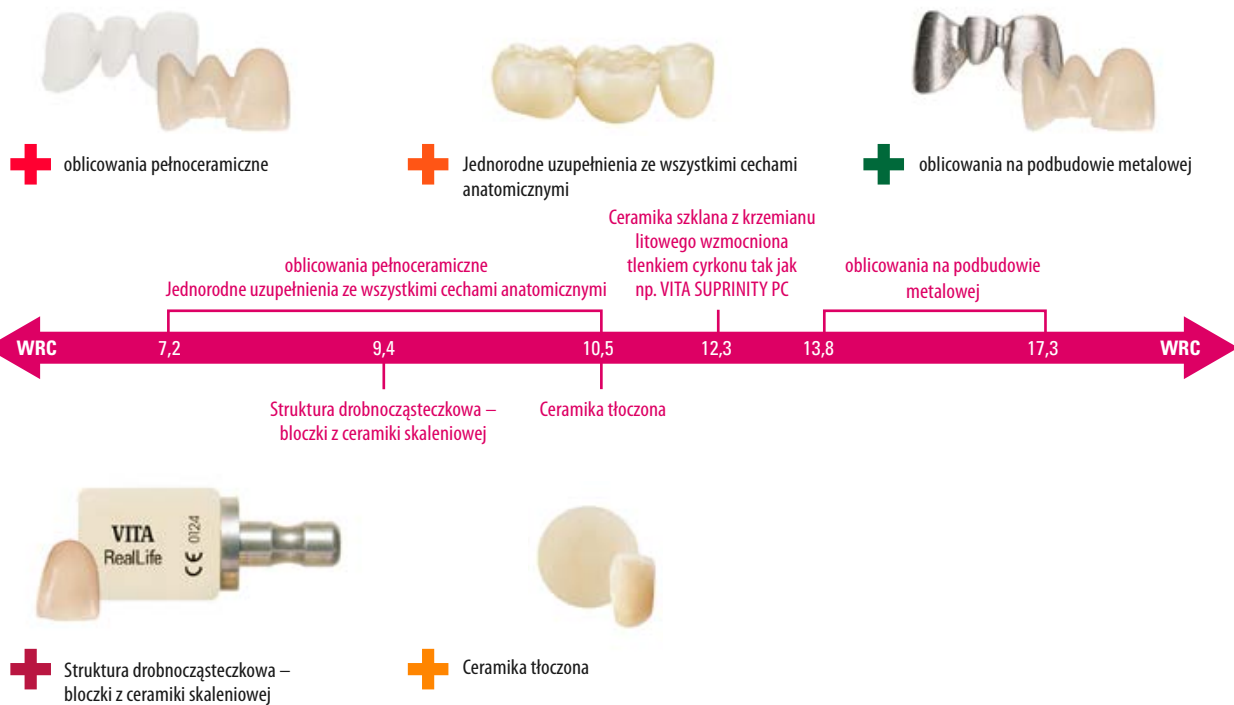

+ Duży Plus dla wszechstronności

Lazurowanie - nakładanie warstwy prześwitującej

Nowość w systemie: farby przeźierne (Body Stains). Farby przeźierne funkcjonują jak cienki filtr kolorów.

Dzięki temu czynnikowi farbki nadają się znakomicie do:

- malowania powierzchni
- zmiany oddziaływania koloru materiału podkładowego - jądra

wyróżnianie

Sz szczególnie drobnoziarniste farby dające efekt wyróżnienia (Effect Stains).

Te farby cechują się w szczególności:

- intensywnym oddziaływaniem koloru
- dokładnym kryciem powierzchni

Dlatego zalecane są do tworzenia naturalnych efektów powierzchniowych i wewnętrznego barwienia.

Glazurowanie


Dla błyszczącego wykończenia pracy:

- VITA AKZENT Plus GLAZE – masa glazury przeznaczona do tworzenia błyszczącej, homogenicznej i szklistej powierzchni.
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT – niskotopliwa masa glazury stosowana w ceramikach, których temperatura napalania znajduje się poniżej 800°C.
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – masa lazury do tworzenia jedwabisto-matowych powierzchni licowanych.
- VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT – wysoce fluorescencyjny spray do glazury
- w celu tworzenia naturalnej fluorescencji.

+ To Plus dla komfortowej obróbki

Wszystkie farby posiadają czynnik fluorescencji, wyjątkowo drobne ziarno oraz stabilności koloru. Tikotropowa konsystencja proszku i pasty umożliwia precyzyjne nakładanie wybranej masy.

Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne kolory zębów.

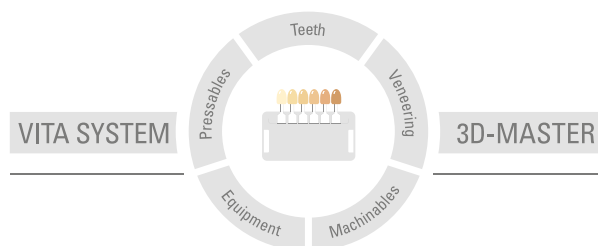

Uwaga: Nasze produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użytkownika. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego stosowania i obsługi. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do sprawdzenia przed użyciem czy produkt jest właściwym dozastosowania w danym polu aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody jeśli produkt jest stosowany w połączeniu i przy użyciu materiałów i urządzeń pochodzących od innych producentów, a które są niekompatybilne lub nie posiadają autoryzacji do stosowania z naszymi produktami. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww zestawu. Data wydania informacji: 11.19

Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualna wersja broszury jest dostępna na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfik a następujące produkty noszą znak **CE** 0124: VITA AKZENT® Plus

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik