

Anleitung zur Durchführung von Softwareupdates mit den Geräten:

vPad-Typ	Seriennummer
VITA vPad comfort	Ab 3020180051
VITA vPad excellence	Ab 2820172050 bis 2820180274

Damit die Updates generell übersichtliche bleiben, gibt es zu jedem vPad – Update ein zugehöriges Ofen-Update mit der gleichen Software-Versionsnummer.

Sehr geehrte Kunde/in, liebe Anwender/innen,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über das neue Softwareupdate für Ihr VITA Gerät informieren und Sie bitten die Updates gemäß der nachstehenden Anleitung auf Ihrem Gerät zu installieren.

Bei Fragen zu diesem Update wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Servicepartner für VITA Geräte. Zusätzlich erreichen Sie den VITA Geräteservice unter:



- Tel.: +49 (0)77 61 / 562 – 101, -105, -106 oder -114
- Fax: +49 (0)77 61 / 562 – 102
- Email: instruments-service@vita-zahnfabrik.com




Allgemeines Vorgehen





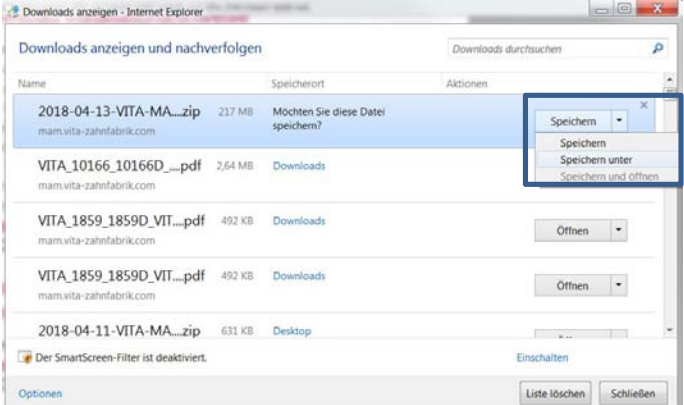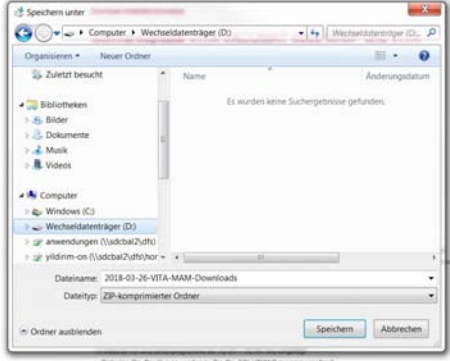

- Überprüfen, ob das zur Verfügung stehende Software-Update für das vorliegende vPad bzw. den Ofen gültig ist.
- Neues Softwareupdate aus dem Internet herunterladen und auf USB-Stick speichern
- Erstellen einer Sicherungskopie Ihrer eigenen User bzw. Materialien und Programme auf einem USB-Stick.
- Softwareupdate für vPad excellence / vPad comfort installieren.
- Software-Version im vPad prüfen
- Im vPad in den Einstellungen unter Gerätedaten die Aktualisierung der Software-Version prüfen.
- Registrierung im VITA Update-Messenger

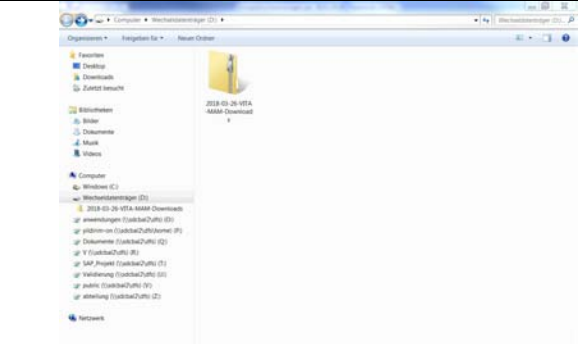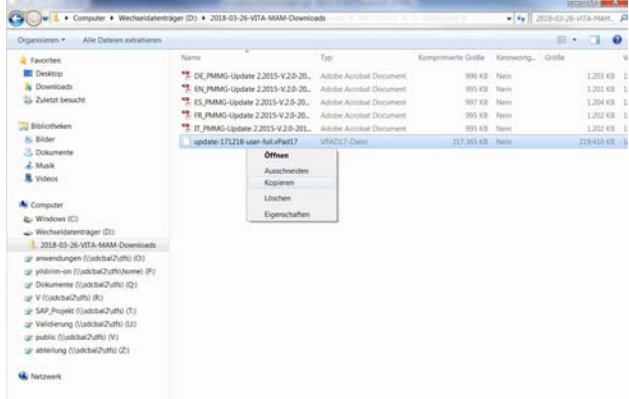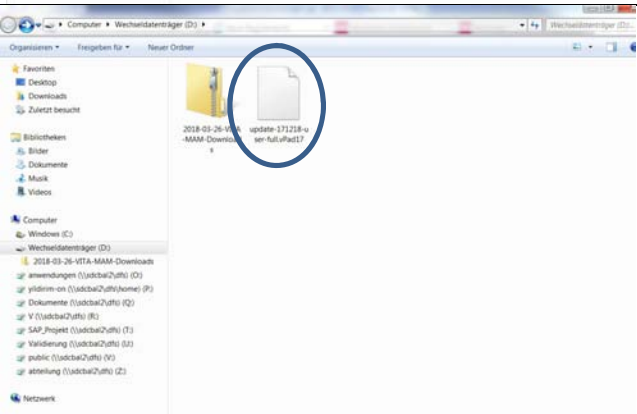
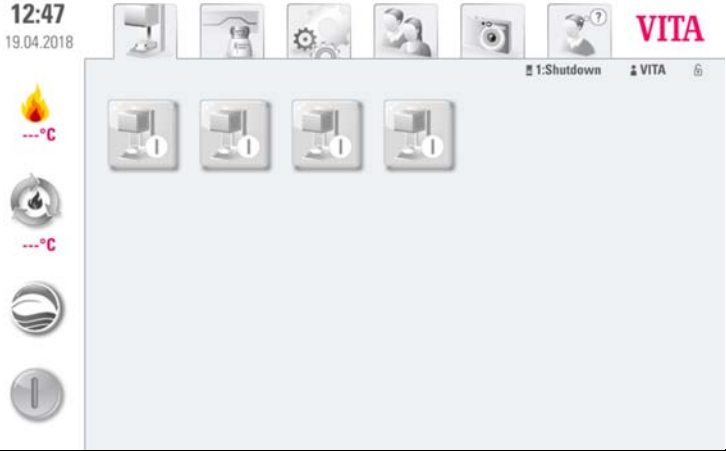



Voraussetzungen für Download und Installation


- Internetzugang
- Leerer USB-Stick

1. Neues Softwareupdate aus dem Internet laden und auf USB-Stick speichern		
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
1.1	Im Update-Messenger den Link „Zum Download VITA vPad comfort/excellence anwählen.	<p>VITA vPad comfort Softwareupdate Version 150227 bis Seriennummer 2420155635</p> <p>Download Softwareupdate für VITA vPad comfort, seriennummernabhängiges Update für Geräte bis Seriennummer 2420155635, gültig für alle Geräte der Baureihe.</p> <p>Zum Download VITA vPad comfort</p> <p>VITA vPad excellence Softwareupdate Version 150227 bis Seriennummer 2320152049</p> <p>Download Softwareupdate für VITA vPad excellence, seriennummernabhängiges Update für Geräte bis Seriennummer 2320152049, gültig für alle Geräte der Baureihe.</p> <p>zum Download VITA vPad excellence</p>
1.2	Wählen Sie „Speichern“ -> „Speichern unter“ (Im Schaubild rechts sehen Sie die Windows 7 Oberfläche; kann je nach Windows-Edition abweichen)	
1.3	Speichern Sie die noch verpackte Update-Datei (.zip-Datei) direkt auf einem leeren USB-Stick (Laufwerk des USB-Stick: Wechseldatenträger).	 <p>Möchten Sie „2018-03-26-VITA-MAM-Downloads.zip“ (217 MB) von „mam.vita-zahnfabrik.com“ speichern?</p> <p>Speichern Abbrechen</p>

1.4	Doppelklick auf den heruntergeladenen Ordner	
1.5	Kopieren Sie nun die (alle) Update-Datei(en).	
1.6	Fügen Sie die kopierte(n) Datei(en) in die erste Ebene, des Wechseldatenträgers, ein.	
1.11	USB-Stick vom Computer trennen	

2. Erstellen einer Sicherungskopie Ihrer eigenen User bzw. Programme		
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
2.1	Gerät mit Hauptschalter einschalten	Lift fährt in die untere Position
2.2	Leeren USB-Stick in das VITA vPad einstecken	
2.3	Button  betätigen	<div> <div> 12:47 19.04.2018 </div> <div>  </div> </div>
2.4	Button  betätigen	<div> <div> 14:48 26.03.2018 </div> <div>  </div> </div>
2.5	User, welcher exportiert werden soll, auswählen.	
2.6	Button  betätigen	<div> <div> 14:48 26.03.2018 </div> <div>  </div> </div>

3. Update-Datei installieren		
Wichtiger Hinweis: Lift muss in unterer Position sein + kein Programm (inkl. Standby) aktiv		
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
3.1	USB-Stick mit Software-Datei in das VITA vPad einstecken	
3.2	Button  auswählen	
3.2	Button  auswählen	 <p>→ Update wird durchgeführt</p>
3.3	Meldung mit Button  bestätigen	Update durchgeführt
Wichtiger Hinweis: Während des gesamten Installationsvorgangs muss der USB-Stick eingesteckt bleiben und es dürfen keine weiteren Tastenbetätigungen vorgenommen werden! Die Installation ist dann abgeschlossen, wenn <u>die tatsächliche Brennraumtemperatur</u> wieder angezeigt wird.		

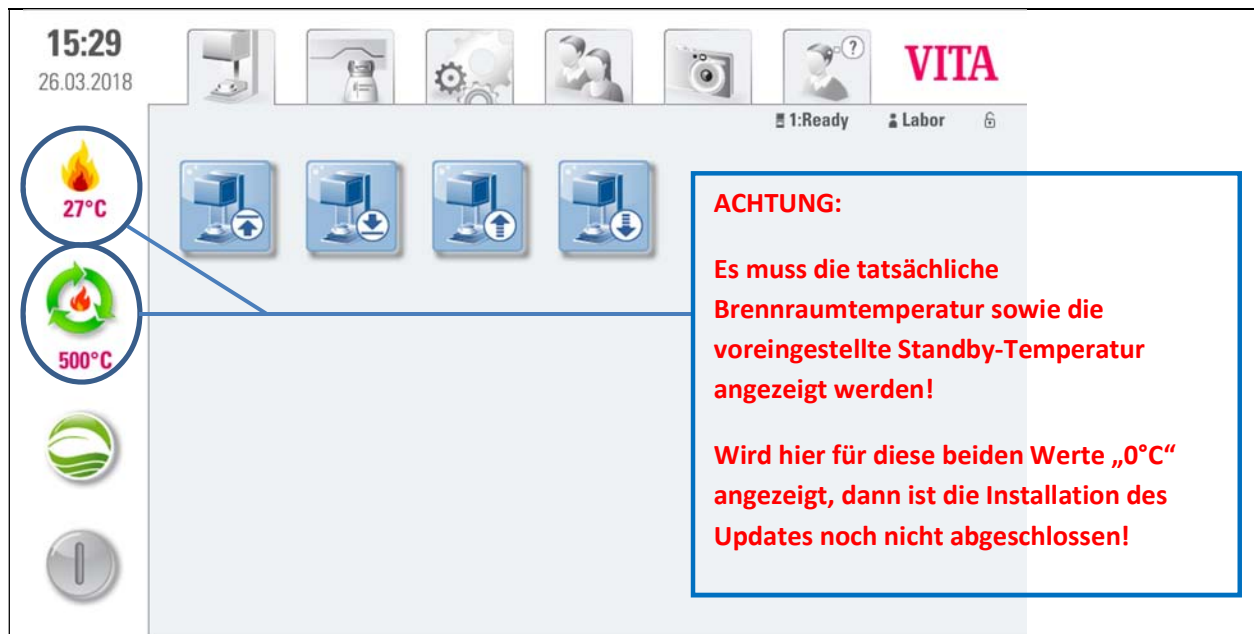

Information:

Wird beim ersten Betätigen des Buttons  die Meldung „Kein neues Update gefunden“ angezeigt, dann diese Meldung mit Button  bestätigen und Button  erneut betätigen.















Update im Mehrofenbetrieb

Zur Durchführung eines Software-Updates im Mehrofenbetrieb müssen die Geräte einzeln geupdated werden, d.h. die Switchbox muss entfernt und das VITA vPad nacheinander an jedes einzelne Gerät angeschlossen und dann das Update entsprechend dieser Anweisung durchgeführt werden.

Um die gewünschte Anzeige-Reihenfolge der Geräte auf dem VITA vPad zu erhalten, müssen die Geräte nach dem Softwareupdate in der entsprechenden Reihenfolge mit dem Hauptschalter eingeschaltet werden.


Beispiel: es wird ein VITA VACUMAT 6000 M und ein VITA VACUMAT 6000 MP über die VITA Switchbox mit einem VITA vPad comfort betrieben. Hier soll der VITA VACUMAT 6000 M als „Nr. 1“ und der VITA VACUMAT 6000 MP als „Nr. 2“ auf dem VITA vPad angezeigt werden. In diesem Fall muss zunächst der VITA VACUMAT 6000 M mit dem Hauptschalter eingeschaltet werden. Danach warten Sie bitte, bis das Startmenü auf dem VITA vPad angezeigt wird. Erst jetzt darf der VITA VACUMAT 6000 MP, welcher als „Nr. 2“ angezeigt werden soll, mit dem Hauptschalter eingeschaltet werden. Dieses Gerät wird nun automatisch im Startmenü an der gewünschten Position hinzugefügt.

Bitte beachten Sie, dass nach der Installation der neuen Software die Gerätedaten und Geräteeinstellungen im Servicebereich an jedem einzelnen Gerät überprüft bzw. eingegeben werden müssen! Siehe hierzu den nachfolgenden Punkt dieser Anleitung.

4. Software-Version im vPad prüfen		
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
4.1	Button  drücken	<div> <div> 12:47 19.04.2018 </div> <div>  ---°C  ---°C   </div> <div>  </div> <div>  </div> </div>
4.2	Button  betätigen	<div> <div> 16:19 26.03.2018 </div> <div>  ---°C  ---°C   </div> <div>  </div> <div>  </div> </div>
4.3	Bitte überprüfen Sie anhand der Software-Version, ob die neue Software richtig installiert wurde. Sollte nicht die aktuelle Version angezeigt werden, muss das Update wiederholt werden!	


4.4


Anschließend mit Button

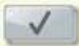
 bestätigen


13:08


27.03.2018


 23°C


 500°C


 19









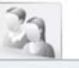










1-Ready

Labor

VITA

Geräteinformationen

Dentalofen Software-Version: 00160913

Dentalofen Serien-Nr.: 1320189301

Dentalofen Name: Ofen

vPad Serien-Nr.: 2820180188

vPad Software-Version: 171218-full

Betriebsdaten

Betriebsstunden: 47

Brennstunden: 23

Brennstunden der Brennmuffel: 16

Anzahl durchgeführter Brennprogramme: 15

Alterungsgrad der Brennmuffel (%): 1


Export


Prozessdaten

Betriebsdaten





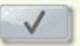






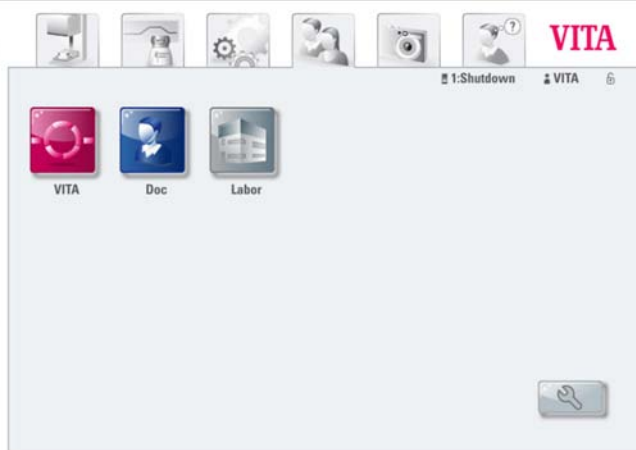





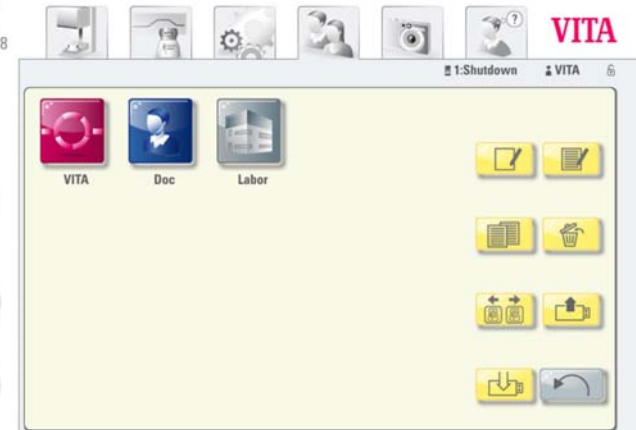
Geräteinformationen





Alle Daten





10

5. Eigenes Profil bzw. Programme wieder installieren		
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
5.1	USB-Stick mit zuvor gesicherten Usern bzw. Programmen in VITA vPad einstecken	
5.2	Button  drücken	<div> <div> 12:47 19.04.2018 </div> <div>  ---°C  ---°C   </div> <div>  </div> </div>
5.3	Button  drücken	<div> <div> 14:41 26.03.2018 </div> <div>  ---°C  ---°C   </div> <div>  </div> </div>
5.4	Button  drücken	<div> <div> 14:41 26.03.2018 </div> <div>  ---°C  ---°C   </div> <div>  </div> </div>

5.5	Profil, welches importiert werden soll, auswählen und Button  betätigen	
5.6	Button  betätigen	

6. Registrierung im VITA Update-Messenger		
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
6.1	www.vita-zahnfabrik.com im Webbrowser aufrufen	
6.2	„Service“ -> „VITA Update-Messenger“ wählen	
6.3	„Jetzt direkt abonnieren“ wählen und im Anschluss den Registrierungsschritten folgen.	